




|  |   |  |
|--|---|--|
|  <p>Comercial Quirúrgica Farmacéutica</p> | <p>SEMP integral<br/><b>COLCHÓN RECTO 25 Kg VERMEIREN</b></p>  | <p>Departamento<br/><u>Técnico</u></p> |
|    | <p>Ficha Técnica</p>  | <p>Ed.1    Pág.1 de 2</p>              |

- SEMP: Superficie Especial para el Manejo de Presión ( GNEAUPP)
- Fabricado por Comercial Quirúrgica Farmacéutica S.A. para Vermeiren Iberica S.L.
- Producto Sanitario Clase I no estéril (según R. D. 1591/2009), fabricado para contribuir a la prevención de úlceras por presión.

## DESCRIPCIÓN:

Colchón compuesto por dos capas de espuma de poliuretano de alta calidad:

- una base recta de espuma de poliuretano flexible con una densidad de 25 kg/m<sup>3</sup>, de unos 10,85 cm de espesor y color gris oscuro, con una dureza por encima de los 4 kPa.
- una capa de espuma viscoelástica de alta densidad, 50 Kg/m<sup>3</sup> , con un grosor de 4 cm y de color amarillo y tacto viscoso que se adapta perfectamente a la forma del cuerpo con la propia temperatura corporal.

La combinación de ambas espumas ofrece por un lado un soporte firme sobre el somier gracias a su base recta y dura, y por otro, una adaptabilidad total a la forma del cuerpo gracias a la espuma viscoelástica, un material termosensible que consigue que el peso del cuerpo se reparta de manera más equilibrada, disminuyendo así las presiones sobre la piel al aumentar la superficie de apoyo.

Este reparto de presiones contribuye a la prevención de úlceras por presión, sin olvidar la sensación de confort para un buen descanso.






## PROPIEDADES:

- Espuma de viscoelástica de alta calidad, fabricada bajo normas ISO.
- Sistema de fabricación de poro abierto, espuma transpirable y flexible, no inyectada.
- *Certificado CONFORT: espuma viscoelástica muy transpirable (según Norma UNE-EN 31092:1996)*
- *Certificado Oeko Tex Standard 100 Clase I , sobre ausencia de sustancias nocivas en los límites requeridos para productos aptos para bebés.*



| Espumas                | Densidad             | Dureza  | Resiliencia |
|------------------------|----------------------|---------|-------------|
| Poliuretano base       | 25 Kg/m <sup>3</sup> | 4,1 kPa | 43,3%       |
| Viscoelástica amarilla | 50 Kg/m <sup>3</sup> | 1,6 kPa | -           |

|  |   |                                |
|--|---|--------------------------------|
| <br>Comercial Quirúrgica Farmacéutica | SEMP integral<br><b>COLCHÓN RECTO 25 Kg VERMEIREN</b>  | Departamento<br><u>Técnico</u> |
|                                        | Ficha Técnica   | Ed.1      Pág.2 de 2           |

### **FUNDA:**

El colchón de espuma está cubierto por una funda de tejido impermeable de poliuretano , de color azul oscuro.

Un tejido elástico, impermeable a líquidos y transpirable al vapor de agua, resistente a los lavados y con tratamientos antimicrobiano y antifúngico , y de resistencia al fuego BS 7175 (CRIB-5) y UNE 23725:1990 ( M-1 R-1 ).

### **Lavado de la funda:**

- Tª de lavado hasta 95° C
- No usar lejía ni derivados.
- No planchar
- No se recomienda el lavado en seco
- Secado en máquina, temperatura y rotación mínimas.
- Autoclave ciclos de 125°

### **Lavado de la espuma:**

- No se puede lavar

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>MEDIDAS aprox.</b> | <b>CÓDIGO CQF</b> |
| 190 x 90 x 15 cm.     | VERMEI-001        |



**Distribuidor:** Vermeiren Iberica S.L.



**Fabricante:** Comercial Quirúrgica Farmacéutica S.A. (CQF)

Autovía Madrid-Toledo, A-42 Km 63.300, P.Industrial Matracón, 4  
 45280, Olías del Rey, Toledo, España  
 Tel: +34 925 354 330 Fax: +34 925 353 803  
 E-mail: cqf@cqfarma.com

**NOTA:** Las especificaciones aquí descritas serán aplicables solamente al producto en cuestión. Podrían darse pequeñas variaciones entre lotes, estando éstas dentro de los límites admitidos.

**GARANTÍA:** CQF garantiza este producto durante cinco años ante cualquier fallo de fabricación. No será válida si su uso o mantenimiento no se hacen siguiendo las indicaciones de las instrucciones, o si el propietario permite que personas no autorizadas hagan un uso incorrecto del mismo.