



## **Rollator Forte**

**Ref.: AD154**

Manual de instrucciones versión: 1.2.0 ES

# Índice

<b>1. Generalidades</b> .....	2
<b>2. Seguridad</b> .....	3
<b>3. Descripción del producto</b> .....	3
<b>4. Montaje</b> .....	4
<b>5. Utilización</b> .....	5
<b>6. Mantenimiento</b> .....	5
<b>7. Después del uso</b> .....	5

© 2025 Ayudas Tecno Dinámicas S.L. Reservados todos los derechos.

Se prohíbe la reproducción, distribución o modificación, total o parcial, de este documento sin la autorización previa y por escrito de Ayudas Tecno Dinámicas S.L.

Ayudas Tecno Dinámicas S.L. se reserva el derecho de actualizar o modificar las especificaciones del producto en cualquier momento y sin previo aviso.

# 1. Generalidades

## 1.1. Introducción

Este manual contiene información esencial para el uso seguro y adecuado del producto. Para garantizar su seguridad durante la utilización del mismo, lea atentamente este documento y siga todas las instrucciones indicadas.

No utilice el producto sin antes haber leído y comprendido completamente este manual. Si tiene dudas o requiere más información, consulte a un profesional sanitario familiarizado con su condición específica, quien podrá asesorarle sobre el uso correcto y los ajustes necesarios.

Asegúrese de estar consultando la versión más actualizada de este manual. Puede descargar la última versión en formato PDF desde el sitio web oficial de [Ayudas Dinámicas](#).




Si tiene dificultades para leer el tamaño de letra del manual impreso, puede acceder al documento digital en formato PDF desde nuestro sitio web, donde podrá ajustar el tamaño del texto según sus preferencias.

Para información adicional sobre el producto, incluyendo avisos importantes de seguridad o posibles retiradas, póngase en contacto con su distribuidor autorizado o contacte a Ayudas Tecno Dinámicas S.L.

En caso de accidente grave relacionado con el producto, informe inmediatamente a Ayudas Tecno Dinámicas S.L.

## 1.2. Símbolos

En este documento se utilizan símbolos y señales que hacen referencia a peligros o usos poco seguros que podrían provocar lesiones físicas o daños materiales. A continuación, se describen estos símbolos:

	<b>ADVERTENCIA</b> Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría ocasionar la muerte o lesiones graves
	<b>PRECAUCIÓN</b> Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría causar lesiones leves o de poca gravedad.
	<b>AVISO</b> Indica una situación que, si no se evita, puede ocasionar daños en la propiedad.

## 1.3. Información sobre la garantía

La garantía se extiende, según la ley vigente de garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por el uso indebido.

Las reclamaciones relativas a la garantía solo pueden efectuarse a través del distribuidor en el que se adquirió el producto.

## 1.4. Limitación de responsabilidad

Ayudas Tecno Dinámicas S.L. no se responsabiliza de los daños ocasionados por:

- El incumplimiento de las indicaciones contenidas en este manual de usuario.
- Un uso incorrecto o inadecuado del producto.
- El desgaste natural derivado del uso y tiempo.
- Un montaje o instalación incorrecta realizada por el comprador o por terceros no autorizados.
- Modificaciones técnicas no autorizadas.
- El uso de piezas de recambio inadecuadas o no autorizadas.

## 1.5. Cumplimiento

La calidad es un pilar esencial para Ayudas Tecno Dinámicas S.L.

Este producto cuenta con la marca CE conforme al Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios, clasificación Clase I.

## 1.6. Vida útil

La vida útil prevista de este producto es de cinco años, siempre que se use diariamente siguiendo las instrucciones de seguridad, se respeten los intervalos de mantenimiento y se utilice correctamente según lo indicado en este manual. La duración real puede variar según la frecuencia e intensidad de uso.

## 2. Seguridad

### 2.1. Información de seguridad

En esta sección se incluye información importante de seguridad para la protección del usuario.



#### ¡ADVERTENCIA!

##### Riesgo de lesiones

Asegúrese siempre de que el producto ha sido correctamente montado siguiendo las instrucciones del fabricante. Si los componentes o accesorios no están bien fijados, existe riesgo de sufrir lesiones tanto el usuario como las personas que lo manipulen.




#### ¡ADVERTENCIA!

##### Riesgo de pérdida de garantía

Utilice únicamente componentes, repuestos y/o accesorios originales, o aquellos aprobados por Ayudas Tecno Dinámicas S.L., con el fin de realizar cualquier operación sin que ello suponga alteraciones o modificaciones en el dispositivo. El incumplimiento de esta indicación eximirá a la empresa de toda responsabilidad por un funcionamiento incorrecto y por los daños que el dispositivo pudiera causar a personas y/o bienes, además de invalidar la garantía y la conformidad con el Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios.

## 2.2. Etiquetas y símbolos en el producto

La etiqueta de identificación se fija en el chasis de la silla de ruedas y le ofrece la siguiente información:

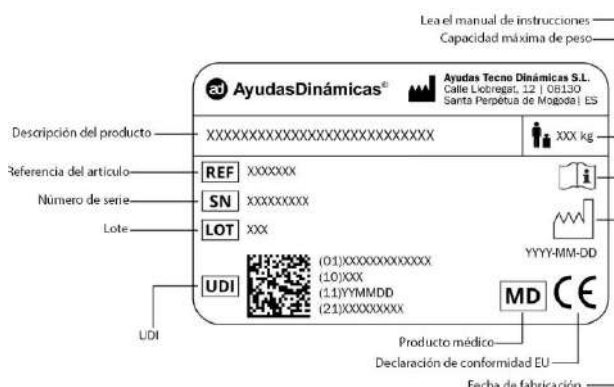

## 3. Descripción del producto

### 3.1. Descripción del producto

El andador FORTE es estable, liviano y, cuando está plegado, ocupa poco espacio. Sirve de ayuda en todos los caminos y ofrece lugar para sentarse y descansar en el momento apropiado.

### 3.2. Uso previsto

El andador FORTE está diseñado para personas con movilidad reducida que pesen un máximo de 150 kg como ayuda para andar y, de forma limitada, como asiento para descansar temporalmente.

Se utiliza en el hogar y en áreas de estacionamiento y ha sido concebido exclusivamente para uso en terrenos firmes y planos.

### 3.3. Indicaciones

El uso del andador FORTE está indicado en los casos siguientes:

- Dificultad para caminar debida a limitaciones del aparato locomotor activo o pasivo.
- Dificultades de coordinación en la fase de marcha.
- Capacidad de esfuerzo reducida.

### 3.4. Contradicciones

El uso del andador FORTE no está indicado en los casos siguientes:

- Trastornos de la percepción.
- Trastornos graves del equilibrio.
- Peso corporal superior a 130 Kg.

El andador no es apropiado para niños.

El andador FORTE no debe usarse como escalera, como ayuda para transportar cargas o personas pesadas o para otros fines similares.

### 3.5. Estructura del andador FORTE



## 4. Montaje

Comunique inmediatamente al transportista cualquier daño que pueda haberse producido durante el transporte. Recuerde conservar el embalaje hasta que el transportista haya verificado el contenido y se haya aceptado el material.



#### ¡ADVERTENCIA!

#### Riesgo de lesiones

Seguir cuidadosamente las instrucciones de instalación; en caso de duda sobre los procedimientos, contactar con el distribuidor autorizado. Mantener los dedos alejados de las partes móviles durante el montaje, desmontaje o regulación. Tras cada montaje comprobar que todos los elementos estén correctamente colocados y fijados y que las partes funcionen adecuadamente.

## 4.1. Montaje

1. Retire todo el contenido del embalaje: respaldo, ruedas traseras (con manetas de freno), marco del andador con asiento y bolsa de transporte, ruedas delanteras. Se incluyen seis perillas de apriete y cuatro clips en C para un montaje fácil y seguro.
2. Despliegue el marco del andador y gírelo hacia un lado. Instale las ruedas sin frenos en la parte delantera del andador insertando la rueda en el tubo correspondiente (Figura A). Alinee el orificio del tubo de la rueda con el marco y asegúrelo en su lugar con su clip en forma de C (atención a la numeración), una vez haya puesto el clip, se debe poner la perilla correspondiente enroscando hasta que quede firme y sujeto (Figura B). Asegurar la rueda está completamente fija en su lugar. Repita con la segunda rueda.

NOTA: Debe ponerse SIEMPRE primero el clip en forma de C o la perilla no encajará.



3. Gire el marco del andador. Fije las ruedas traseras (con manetas de freno) insertando el tubo en el marco del andador, asegurándose de que las ruedas estén orientadas hacia el exterior del andador. Alinee el orificio del tubo de la rueda con el marco y asegúrelo en su lugar con la perilla de apriete, enroscando la perilla en el interior. Inserte el clip en C encima de la perilla para asegurar la rueda en su lugar. Fije el cable del freno a la abrazadera en forma de "S" provista en el marco del andador. Repita con la segunda rueda.
4. Coloque el andador en posición vertical. Inserte el tubo del mango del freno en el cuadro y ajústelo a la altura deseada. Asegure en su lugar usando la perilla de apriete B, enroscando la perilla desde afuera. Repita para el segundo mango, asegurándose de que ambos estén a la misma altura.
5. Coloque el respaldo acolchado presionando los botones negros del pulgar y deslizándolos entre los soportes negros. Tenga en cuenta que el respaldo puede plegarse cuando no esté en uso.

## 5. Utilización

### 5.1. Utilización del andador FORTE

Antes de utilizar su andador FORTE por primera vez, familiarícese con él lo suficiente para que se sienta seguro de su manejo. En este caso, se recomienda que lleve un acompañante. Antes de utilizar el andador, compruebe que está montado de manera correcta:

- ¿Están bien apretadas todas las piezas acoplables?
- ¿Están bien apretados todos los tornillos?
- ¿Funcionan los frenos?
- ¿El andador está bien asentado sobre las cuatro ruedas?

### 5.2. Caminar con el andador

Sitúese detrás del andador y agarre los asideros con ambas manos. Cuando ya tenga una posición estable, suelte los dos frenos. Ahora ya puede caminar.

### 5.3. Frenos

Para frenar el andador durante la marcha, tire de ambas palancas de freno de manera ligera y uniforme hacia arriba.



Para bloquear los frenos (freno de estacionamiento), presione las palancas de freno hacia abajo. Podrá escuchar claramente cómo se encajan por sí mismas.



Para desbloquearlas, tire de las palancas de freno hacia arriba (ilustración superior)

## 6. Mantenimiento

Para garantizar un funcionamiento seguro del andador en todo momento, se recomienda una inspección visual periódica de este producto por

parte del usuario, para garantizar que todas las piezas y herrajes estén seguros, que los componentes estén en buen estado de funcionamiento y no estén desgastados, rotos, deshilachados o sueltos, y que no haya obstrucciones o impedimentos para la normalidad, operación segura. Si alguna parte o mecanismo parece ser inseguro o comprometido, no use el producto. Si tiene problemas, comuníquese con el distribuidor autorizado que le vendió el producto para obtener más información. Una conservación y mantenimiento defectuosos o negligentes del andador tienen como consecuencia la limitación de la garantía.

### 6.1. Limpieza

Limpie las piezas del marco del andador regularmente frotándolas con un paño húmedo. Para la suciedad persistente, utilice un detergente suave y agua caliente. El revestimiento del asiento y la bolsa de la compra pueden lavarse a mano utilizando una solución jabonosa suave a una temperatura de hasta 40 °C. Las ruedas se pueden limpiar con un cepillo húmedo con cerdas de plástico. Elimine la suciedad y las pelusas de los cubos de las ruedas. Para la limpieza, emplee solo detergentes y desinfectantes comerciales suaves.

### 6.2. Almacenamiento

Si desea almacenar el andador, asegúrese de hacerlo en un lugar seco, protegido de la radiación solar directa y a una temperatura comprendida entre 0 °C y 45 °C. No active los frenos de estacionamiento y asegure el andador para evitar que pueda ponerse en movimiento de manera involuntaria. Tras un periodo de almacenamiento largo (> 4 meses) y antes de volver a usar o de reacondicionar el andador compruebe todos los puntos de verificación que se indican en el capítulo de mantenimiento.

## 7. Después del uso

### 7.1. Reciclado

Si ya no va a necesitar el andador, póngase en contacto con su distribuidor autorizado, que recogerá el andador y lo eliminará o reciclará de manera adecuada. Si esto no fuera posible, lleve el andador a su punto de reciclado local.

## 7.2. Reutilización

El número de reutilizaciones posibles depende del estado, del desgaste del material y de la funcionalidad del producto correspondiente. Si va a transmitir el andador a un nuevo usuario o al distribuidor o a reutilizarlo, recuerde entregar todos los documentos técnicos necesarios para hacer un manejo seguro del producto. Antes de reutilizarlo, el andador se debe limpiar, desinfectar e inspeccionar para detectar y reparar posibles daños.

## 7.3. Desinfección

Para el acondicionamiento manual de un producto auxiliar usado, todas las piezas se deben limpiar en profundidad con un desinfectante de superficies. Es recomendable prestar especial atención a la desinfección de las superficies que entran en contacto con las manos o la piel con frecuencia, como las manetas de empuje.



**Ayudas Tecno Dinámicas S.L.**

c/Llobregat 12, Santa Perpètua, 08130, Barcelona

Tel. 935 74 74 74 Fax. 935 74 74 75

info@ayudasdinamicas.com, www.ayudasdinamicas.com