

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA.

Importante leer el manual antes de utilizar el producto.

1 — Partes de la silla.....	4
2 — Descripción del producto	4
3 — Características del producto	5
4 — Antes de empezar y mas información	7
5 — Mando control	8
6 — Uso y montaje	9
7 — Batería	12
8 — Mantenimiento y limpieza	13
9 — Lista de verificación de problemas.....	9
10 — Garantía	10

1. PARTES DE LA SILLA



2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA CON BASCULACIÓN ELÉCTRICA

La Calabria 5, es la silla de ruedas eléctrica con más prestaciones de la familia Calabria. Los aspectos que cabe destacar, es la basculación eléctrica pulsando un botón y la regulación en altura de los reposapiés también electrónicamente. Dispone de un sistema muy completo de luces y el cabezal es ajustable en altura.

Además cuenta con un respaldo confort que la convierte en una silla de ruedas eléctrica muy cómoda para el usuario.

Tiene dos motores de 500W que le permite alcanzar los 12 km/h, dispone de dos baterías de gel de 75 Ah que proporcionan una autonomía de 40a 50 km.

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



CALABRIA 5

INFORMACIÓN GENERAL

Medidas

Ancho total	68 cm
Profundidad sin reposapiés	85,5 cm
Profundidad total	112 cm
Alto total	118 cm
Alto del asiento al suelo	55 cm

Peso

Peso total	126 kg
Peso máximo soportado	180 kg

Material	Aluminio	Color	Negro/Naranja
-----------------	----------	--------------	---------------

Asiento

Ancho del asiento	45 cm
Profundidad del asiento	44 cm
Tipo de asiento	Fijo
Material del asiento	Acolchado

Reposabrazos

Ancho de reposabrazos	7 cm
Largo de reposabrazos	36 cm
Material de reposabrazos	Inyectado
Tipo de reposabrazos	Abatibles

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Reposapiés

Tipo de reposapiés	Individuales, elevables, regulables y plegables
Material del reposapiés	Plástico y aluminio

Respaldo

Ancho del respaldo	42,5 cm
Alto del respaldo	60 cm
Tipo de respaldo	Reclinable
Material del respaldo	Acolchado

Ruedas

Medidas ruedas delanteras	Ø 25 cm
Medidas ruedas traseras	Ø 35 cm
Ancho ruedas delanteras	8 cm
Ancho ruedas traseras	10 cm
Tipo de ruedas	Macizas / Hinchables

Motor

Potencia motor	2 x 500 W
Batería	2 x 75 Ah (gel)
Número de baterías	2
Velocidad máxima	12 km/h
Autonomía	40 - 50 km
Cargador externo	8 Ah

Otras características

Basculación	Eléctrica
Cinturón de seguridad	Sí
Claxon	Sí
Frenos	Electromagnéticos
Joystick	Programable
Luces delanteras	Sí
Luces traseras	Sí
Luces intermitentes	Sí
Marcha atrás	Sí
Máxima pendiente de escalada	12º
Radio de giro	1000 mm
Ruedas antivuelco	Sí



Semiperfil.



Parte trasera.



Calabria 5 reclinable.

4. ANTES DE EMPEZAR Y MÁS INFORMACIÓN


4.1. PRACTICAR ANTES DE OPERAR

- Antes de conducir el vehículo todos los días, debe encontrar un área abierta como un parque para practicar maniobras.
- Recomendamos que cuando practique la conducción esté acompañado por un asistente.
- Siempre asegúrese de que el vehículo no esté encendido antes de entrar o salir del vehículo.
- Siempre verifique que la configuración de velocidad se elija de acuerdo con su experiencia y habilidades.
- Mientras practica, mantenga la velocidad en la posición más lenta.

Para conducir con seguridad, asegúrese de estar familiarizado con las características del vehículo y las formas de conducción.

4.2. MIENTRAS OPERA

1. Primero, practique avanzar. Asegúrese de que la velocidad se establece en la posición más lenta.
2. Luego, practique los giros en "S". Finalmente, practica la conducción hacia atrás.
3. Por favor, tenga en cuenta que, mientras conduce hacia atrás, el vehículo siempre se mueve más lento, independientemente del ajuste de la velocidad.

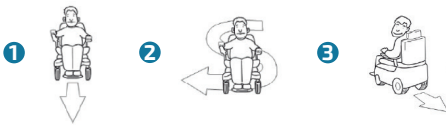

4.3. SEGURIDAD DEL USO

- No llevar pasajeros.
- No conducir después de beber alcohol.
- Consulte a su médico para verificar si sus medicamentos afectan su capacidad de conducción.
- No utilice ningún dispositivo de comunicación personal, como radios o teléfonos móviles.
- No remolcar un remolque.

4.4. CONDUCCIÓN AL AIRE LIBRE

- No use la silla de ruedas en superficies blandas, desiguales y desprotegidas, como hierba, grava, arena, al lado de un río, lagos...
- No usar las sillas de ruedas para conducir fuera de la carretera.
- Asegúrese de que no haya obstáculos detrás de usted cuando conduce hacia atrás. Recomendamos configurar la velocidad en la posición más lenta.
- No te detengas de repente, siempre trata de hacer giros suavemente.
- Mantenga siempre sus brazos en los reposabrazos y los pies en el reposapiés mientras conduce.
- No trates de subir bordillos por encima de 7 cm.
- No intente conducir sobre un agujero / espacio más ancho que 10 cm.

4.5. CONDUCCIÓN EN COLINAS Y TERRENO IRREGULAR

Conducir en las colinas y otros terrenos irregulares es más peligroso que conducir sobre superficies planas. Seguir las siguientes reglas es esencial para evitar accidentes y lesiones graves.

- No trates de subir una colina cuyo grado supere los 10 °.
- No retroceda mientras sube o baja la colina.
- No use la silla de ruedas en superficies blandas, desiguales y desprotegidas, como hierba, grava o arena.
- Al bajar la pendiente, elige la velocidad más lenta.
- No suba ni baje de la silla de ruedas si permanece en una pendiente (para subir / bajar de la silla de ruedas necesita colocarla sobre una superficie plana).
- Subir o descender siempre las colinas perpendiculares a la pendiente.

5. MANDO CONTROL



5.1. PARÁMETROS TÉCNICOS

- Panel de control electrónico.
- El panel de control electrónico permite controlar la silla de ruedas eléctrica, el estado de la batería y el estado general del sistema electrónico.
- El panel de control electrónico generalmente se coloca en el reposabrazos y se une a la batería y el motor. El panel se puede colocar en el reposabrazos izquierdo / derecho o detrás de la silla de ruedas (cuando lo utiliza un cuidador).

5.2. JOYSTICK

El joystick permite controlar la dirección y la velocidad de movimiento. Empuje el joystick hacia adelante para liberar el freno electromagnético y puesta en movimiento de la silla de ruedas. Cuanto más empuje el joystick hacia adelante, más rápido la silla de ruedas se moverá. Si suelta el joystick, la silla de ruedas disminuirá la velocidad y se detendrá.

5.3. MODOS DE LA SILLA

Ajuste del respaldo, asiento y reposapiés:

El joystick le permite ajustar la posición del respaldo, el asiento y el reposapiés. Mueve el joystick a la izquierda o la derecha para elegir la parte de la silla de ruedas que desea ajustar.

Cuando empuja el joystick hacia adelante, la parte elegida se moverá hacia arriba. Cuando mueves el joystick hacia atrás, se bajará.

Modo de conducción:

El joystick te permite controlar y maniobrar la silla de ruedas. Empuja el joystick hacia adelante para seguir recto. Mueve el joystick hacia atrás para conducir marcha atrás. Para girar a la izquierda o derecha, mueva el joystick hacia el lado izquierdo o derecho. Si quieres parar, suelte el joystick.

5.4. BARRA DE ESTADO DE LA BATERÍA

Puede encontrar la barra de estado de la batería en la parte superior del controlador. Usando el indicador de luz de color, la barra de estado de la batería proporciona información sobre el suministro, la potencia aproximada de las baterías, los sistemas eléctricos de la silla de ruedas utilizando un código de color.

● ● ● La luz roja, amarilla y verde constante indica que las baterías están completamente cargadas, los sistemas eléctricos y el sistema electrónico del panel de control es eficiente.

● ● La luz roja y amarilla constante indica que debe cargar las baterías, los sistemas eléctricos y el sistema electrónico del panel de control es eficiente.

● ● Solo luz roja constante o luz roja parpadeante lentamente: debe cargar las baterías tan pronto como sea posible, los sistemas eléctricos y el sistema electrónico del panel de control es eficiente.

●●● Si las luces parpadean, el sistema electrónico o el sistema eléctrico no funciona correctamente. Si las luces de advertencia parpadean 6 veces el motor izquierdo está dañado. Si las luces de advertencia parpadean 5 veces, el motor derecho no trabaja adecuadamente.

Si las luces de advertencia parpadean continuamente, el joystick no estaba en la posición neutral cuando la silla de ruedas estaba apagada. Apague la alimentación, suelte el joystick y vuelva a encenderla.

Si siguió las instrucciones del manual del usuario, pero las luces de advertencia siguen parpadeando, por favor, contacte a su distribuidor.

6. USO Y MONTAJE

6.1. USO DEL MANDO CONTROL

Botones de ajuste de velocidad: Hay dos botones de ajuste de velocidad: si desea reducir la velocidad, presione el botón de desaceleración. La velocidad real se muestra en el indicador situado debajo de la barra de estado de la batería. Cuanto más rápido te mueves, más luces están encendidas.

Botón de la bocina: Presiona el botón para activar la bocina.

Toma de corriente del cargador: La toma de corriente se utiliza para cargar la batería, enchufe el cargador (máx. 12A).

Botón de luces de conducción: Cuando encienda las luces de conducción, se activará el icono de luz correspondiente.

Botón de giro a la izquierda: Al presionar el botón, se activará el icono de luz correspondiente. Para desconectar el intermitente, vuelva a pulsar el botón.

Botón de giro a la derecha: Al presionar el botón, se activará el icono de luz correspondiente. Para desconectar el intermitente, vuelva a pulsar el botón.

Botón de luz de advertencia: Activa las luces de advertencia.

Por favor, recuerde que cuando el sistema de accionamiento eléctrico se apaga, los frenos electromagnéticos también están desconectados.

Nunca apague la unidad electromagnética si no hay ninguna persona que pueda empujar su silla de ruedas.

Nunca apague la unidad electromagnética si la silla de ruedas se encuentra en una pendiente o en cualquier otro terreno inclinado: la silla de ruedas puede ir cuesta abajo, lo que puede provocar daños de la misma o una lesión.

6.2. USO DEL CARGADOR

Enchufe el cable de salida del cargador en el enchufe de la parte inferior del controlador.

Después de conectar el cable de salida del cargador al enchufe de carga y a la toma de corriente, encienda el panel de control electrónico. La barra de estado de la batería parpadeará.

La silla de ruedas no se moverá mientras se carga, incluso si se empuja el joystick.



6.3. USO DEL INTERRUPTOR DE ALIMENTACIÓN

"-" Botón de encendido

Botón de apagado "0"

Para encender el cargador, presione el botón para cambiarlo a la posición "-"



6.4. USO DE LAS LUCES INDICADORAS DE CARGA

- Luz naranja: carga en curso.
- Luz amarilla: carga completada, las baterías están completamente cargadas.



6.5. USO DE LA COMODIDAD DE LA SILLA

Para cambiar de modo de conducción a modo de ajuste de comodidad de la silla, deberá de presionar en el botón "M" que se encuentra en el mando control, si no lo ubica, en el apartado "Mando control, página 8" lo señalizamos.

Por favor, mire el ícono de la silla de ruedas que se encuentra en el controlador: indicará qué parte de la silla de ruedas (respaldo, asiento o reposapiés) está listo para ser ajustado. Mueve el joystick hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar la parte de la silla de ruedas que quiere ajustar. Cuando se haga su elección, el indicador luminoso correspondiente le mostrará qué parte se ajustará. Cuando empuja el joystick hacia adelante, la parte elegida se moverá hacia arriba. Cuando mueves el joystick hacia atrás, se bajará.



6.6. USO DEL CABEZAL

El cabezal tiene varios ajustes de altura y regulación para mejorar su comodidad, regule dicho objeto hasta encontrar la posición ideal.



6.7. USO DEL REPOSABRAZOS

Para ajustar la altura del reposabrazos, afloje el mango, elija la altura deseada y vuelva a poner el tornillo.




6.8. USO DE AJUSTE DEL CONTROLADOR

Es posible ajustar la posición del controlador a las necesidades individuales. Desenrosque el tornillo de la barra del controlador situado debajo del reposabrazos y elija la posición deseada del controlador. Luego vuelva a poner el tornillo. El controlador se puede colocar en el reposabrazos derecho o izquierdo. También se puede colocar en la parte trasera de la silla de ruedas y ser utilizado por el cuidador.



6.9. USO DEL CINTURON DE SEGURIDAD

Antes de conducir la silla, póngase el cinturón de seguridad. Para desabrochar, pulse el botón que dice "press".

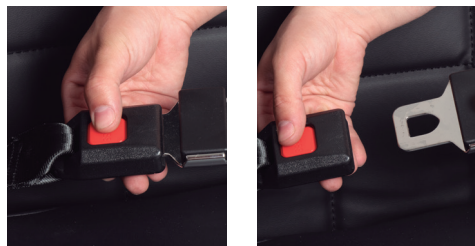

6.10. USO DE LA PALANCA DEL REPOSAPIÉS


Estire la palanca hacia arriba, mueva el reposabrazos hacia fuera y levántelo hacia arriba para extraerlo, desconecte el cable que une con el reposabrazos



6.11. USO DEL EMBRAGUE DEL MOTOR

Si desea empujar la silla de ruedas eléctrica, tire de la palanca del embrague hacia un lado para abrir.

Accionamiento automático: tire de la palanca del embrague para el otro lado para cerrar.

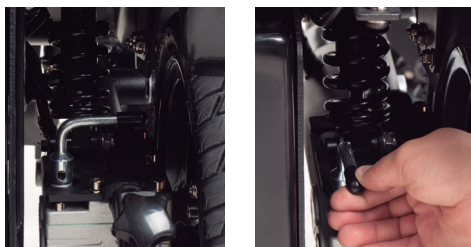


6.12. USO DE LAS RUEDAS ANTIVUECOS

Las ruedas antivuelco protegen la silla de ruedas contra caídas en caso de pequeñas inclinaciones laterales, proporcionan mejor estabilización. Es posible plegar o desplegar las ruedas como se muestra en las siguientes imágenes:



6.13. MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA BATERÍA

Tire del seguro de la bandeja de la batería hacia arriba. Extraiga la bandeja de la batería.

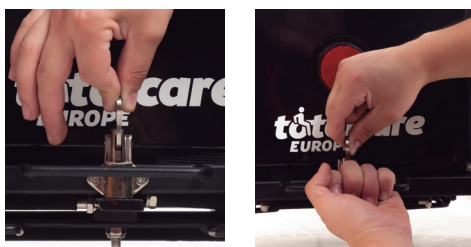

7. BATERÍA

El cargador es la parte clave de la silla de ruedas. Para cargar las baterías de forma rápida y segura, utilice solo el cargador original suministrado con la silla de ruedas y siga las reglas a continuación.

1. Siempre conecte el cargador a la toma de carga ubicada en la parte inferior del controlador. Luego, enchúfelo a la toma de corriente.
2. Siga las instrucciones que se detallan en el tablero del cargador.
3. El tiempo de carga depende de la condición de la batería. La mejor opción es cargar las baterías por la noche cuando las baterías están cargadas, el cargador dejará de funcionar automáticamente.
4. Cuando finalice la carga, retire el cargador de la toma de corriente y luego de la carga del enchufe. Nunca deje el cargador conectado a la toma del cargador si no está conectado a la alimentación de salida.

Si necesita reemplazar las baterías, comuníquese con su distribuidor.



PRECAUCIÓN

Nunca enchufe el cargador a la toma de corriente de más de 12 V. Siempre use el cargador original suministrado con la silla de ruedas. No seguir las reglas anteriores puede llevar al cargador a un sobrecalentamiento y llegar a prenderse. No cargue las baterías en lugares húmedos. Nunca parar o suspenda la carga si las baterías no están completamente cargadas. La carga debe durar hasta el tiempo en que las baterías están completamente cargadas.

Las baterías están equipadas con un protector de sobrecarga (75AH) que desconecta automáticamente una carga cuando la corriente supera un valor predeterminado.

Cuando la silla de ruedas está sobrecargada, el protector de sobrecarga saltará y desconectará la carga. Si el motor está sobrecargado, detenga la silla de ruedas y espere hasta que el motor se enfríe. Luego, empuje hacia abajo el protector de sobrecarga y reactive la silla de ruedas. Si no es posible reactivar la silla de ruedas, comuníquese con el punto de servicio.



PRECAUCIÓN

Nunca dejes que las baterías se descarguen completamente. Si nota la última luz amarilla o la primera luz roja del controlador, cargue las baterías. Recuerde que el ciclo de carga debería tomar entre 9 y 10 horas, hasta que las baterías estén completamente cargadas.

Nunca detenga ni suspenda la carga si las baterías no están completamente cargadas. No siguiendo las reglas anteriores pueden causar daños a la batería.

Si almacena las baterías, asegúrese de que estén completamente cargadas.

Si no usa su silla de ruedas con regularidad, debe cargar las baterías al menos cada dos semanas. Recuerde que cada carga debe ser completada y durar aproximadamente 9-10 horas, hasta que las baterías estén completamente cargadas.

Si observa alguna fuga en la batería, póngase en contacto con su distribuidor.

Al cargar las baterías, mantenga siempre la silla de ruedas y el cargador alejados de cualquier fuente de calor.

8. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Para garantizar que su silla de ruedas le brinde años de funcionamiento sin problemas, el usuario debe inspeccionar y mantener regularmente la silla de ruedas y entregarla al distribuidor autorizado para su revisión anual de mantenimiento integral e inspección. Si encuentra algún problema o anomalía mientras usa la silla de ruedas, póngase en contacto con el punto de servicio autorizado más cercano.

8.1. INSPECCIÓN ANUAL

La inspección anual es para verificar si la silla de ruedas está en buen estado y si todos los sistemas (Sistema de conducción, sistemas eléctricos y electrónicos) funcionan correctamente. También ayuda a prevenir posibles problemas que pueden surgir de los defectos existentes. La inspección debe incluir:

- Inspección de neumáticos.
- Inspección de la batería y del cableado.
- Inspección del programa de control del controlador y verificación de si es necesario volver a editarlo.
- Inspección del marco principal.
- Inspección del respaldo y cojines del asiento.

8.2. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Proteja el controlador y el joystick contra golpes violentos y sacudidas.
- Evite la exposición prolongada de la silla de ruedas eléctrica al frío extremo, al calor o a la humedad.
- Mantenga siempre limpios el controlador y la palanca de mando.
- Mantenga la silla de ruedas alejada del contacto directo con el agua.
- Mantenga siempre limpios el marco y la tapicería. Use un paño suave y seco para limpiar el marco principal y la tapicería. No utilice ningún abrasivo. Durante la limpieza, no utilice detergentes directamente sobre el controlador, cargador de batería u otros conectores de alimentación.
- Engrase ligeramente el pasador del eje, el eje de la rueda y los cojinetes cada tres meses.
- Utilice únicamente las baterías originales su-

ministradas con la silla de ruedas. Si quiere cambiar las baterías, contacte a su distribuidor.

- Cargue regularmente las baterías. Asegúrese siempre de que el cargador esté correctamente conectado a la toma de corriente. Nunca desconecte el cargador tirando del cable.
- Inspeccione regularmente la condición del joystick: apague la alimentación y verifique si el joystick no está dañado. Intente empujar el joystick y luego suéltelo; debería volver automáticamente a su punto muerto, posición central. Verifique que la funda de goma alrededor de la base del joystick no esté dañada. No lo maneje ni intente repararlo. Consulte al distribuidor autorizado si hay algún problema.
- Revise cuidadosamente todos los cables; si observa algún daño, comuníquese con el punto de servicio autorizado. Asegúrese de que todas las conexiones de cableado sean correctas y adecuadas; No apriete demasiado los tornillos.
- Asegúrese de que todas las partes del sistema del controlador estén bien sujetas a su silla eléctrica.
- Su silla de ruedas eléctrica debe almacenarse en un lugar seco y libre de temperaturas extremas. Cuando guarde la silla y desconecte las baterías de la silla eléctrica, consulte "Baterías y carga" en este manual. Si no almacena la unidad en las condiciones anteriores, el marco puede oxidarse y la electrónica puede dañarse

8.3. ALMACENAMIENTO

La silla de ruedas eléctrica debe almacenarse en un lugar seco, libre de temperaturas extremas. Siempre retire las baterías cuando la silla de ruedas esté guardada. Recuerda que como la mayoría de los equipos eléctricos, su silla de ruedas eléctrica es susceptible a daños. Evitar ambientes húmedos de cualquier tipo. Si usted almacena la silla de ruedas en lugares inadecuados, el bastidor puede oxidarse fácilmente y los componentes eléctricos pueden estar dañados.

9. LISTA DE VERIFICACIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Solución
Las luces del controlador parpadean rápidamente cuando se enciende la alimentación.	Apague la alimentación, ponga el joystick en su posición neutral. Luego espera unos segundos y reactive la silla de ruedas.
Las luces del controlador parpadean lentamente mientras se conduce.	El parpadeo lento significa que el nivel del cargador de la batería es bajo y que las baterías deberían estar en carga lo antes posible.
Las luces del controlador destellan continuamente y no es posible controlar la silla de ruedas.	El parpadeo continuo de las luces indica que puede haber un problema eléctrico. Desconecte la alimentación y póngase en contacto con su punto de servicio autorizado.
La luz roja del controlador colocada en el cargador de la batería no se enciende durante la carga.	Compruebe que todos los cables estén correctamente conectados y enchufados a una toma de corriente. Si el controlador rojo aún no se enciende, desconecte el cargador de la batería de la toma de corriente y del panel de control, apague la silla de ruedas y póngase en contacto con un punto de servicio autorizado.
La silla es difícil de manejar.	Primero, verifique si las cuatro ruedas están correctamente instaladas en la silla de ruedas eléctrica. Segundo, compruebe si la palanca del embrague está correctamente en la posición correcta.
Si detecta que hay problemas con los motores, el cargador de batería, el controlador o daño al marco de la silla eléctrica, se recomienda que se ponga en contacto con el distribuidor autorizado más cercano.	Si observa algún otro aspecto irregular de su silla o si no responde después de hacer algunas de las inspecciones mencionadas arriba, llame a su punto de servicio autorizado más cercano.

10. GARANTÍA

DURACIÓN DE LA GARANTÍA

El producto adquirido por Ud. queda protegido por la presente garantía, por la falta de conformidad del cliente que se manifieste en el plazo de 3 años desde la fecha de compra del producto o la fecha de entrega.

ALCANCE DE LA GARANTÍA

La garantía cubre toda avería o defecto de fabricación durante los primeros 24 meses desde la compra del producto, a partir de los 2 años y hasta los 3 años, el consumidor debe seguir dirigiéndose a la parte vendedora para conseguir reparar la falta de conformidad del bien, pero en el caso necesario el usuario deberá demostrar que el producto esta defectuoso por fabricación y no por un mal uso o una falta de mantenimiento.

El alcance territorial de esta Garantía es para todo el territorio nacional español.

La presente Garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a lo establecido en el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en defensa de los consumidores.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

Para poder hacer efectiva la Garantía el consumidor deberá dirigirse al punto de venta donde adquirido el producto, en el caso de que le sea imposible la comunicación con el punto de venta, ya sea porque ha cerrado o porque ha adquirido el producto en otra comunicad autónoma, se podrá dirigir directamente al fabricante a través del correo electrónico info@totalcare-europe.com.

Es imprescindible presentar copia de la factura o del ticket de compra, o un albarán de entrega posterior a la factura o ticket, en el momento de la reclamación, donde ampare claramente el producto comprado y la fecha.

El consumidor deberá entregar el producto en el mismo lugar que los adquirió, acompañando una nota explicativa de la falta de conformidad.

LA PRESENTE GARANTÍA NO CUBRE

- Los daños causados por mal uso por parte del usuario al no obedecer las instrucciones indicadas en este manual o causadas por otros factores humanos, mal uso, colisión con algún objeto...
- Los daños causados por accidente, abuso, negligencia o mal uso.
- Los daños causados por fuego, inundación, tormentas o cualquier evento de la naturaleza.
- Los productos que hayan sido previamente reparados o manipulados por personal no autorizado por el fabricante o vendedor.
- Si las piezas utilizadas no son fabricadas por nuestra empresa.
- Cualquier producto que no lleve o tenga alterado o borrado su numero de serie o de fábrica.
- La garantía no cubre los elementos de desgaste.
- Las reparaciones o sustitución de la pieza defectuosa serán efectuadas por un personal cualificado y autorizado por TotalCare Europe, S.L.

NO UTILICE ESTE PRODUCTO SI APARENTEMENTE ESTÁ DAÑADO O LE FALTAN PIEZAS.

CONTACTE CON SU PROVEEDOR.

Leyenda etiquetaje.



Conformidad Europea.



Representante Europeo.



Debe consultar las instrucciones de uso para obtener información de seguridad.



Lote.



Consulte el manual de usuario antes de utilizar el producto.



Referencia del producto.



Datos del fabricante.



Número de serie.



Fecha de fabricación.



Producto sanitario conforme con el MDR.

Manual de usuario

Silla de ruedas eléctrica Calabria 5

V1 · 14/06/2022