

## **Instrucciones de uso y normas de seguridad para camillas FIJAS**

### **INSTRUCCIONES GENERALES**

Es imprescindible leer y aplicar las instrucciones de uso y seguridad.

Se recomienda familiarizarse con el uso correcto de la camilla antes de empezar a utilizarla.

El uso de la camilla puede resultar peligroso si recibe una manipulación inadecuada o distinta de la propia por parte de personal no cualificado.

Revise regularmente la camilla en su totalidad por si existe cualquier indicio de avería o desperfecto.

Las piezas defectuosas o desgastadas por el uso deben reponerse inmediatamente utilizándose única y exclusivamente las piezas originales de repuesto del fabricante.

**AVISO: En caso de utilizar piezas no originales o alterar la estructura de la camilla la garantía quedará anulada. En este supuesto tanto las instrucciones del fabricante como el certificado de conformidad pierden validez**

### **INSTRUCCIONES DE USO**

A) Estabilidad de la camilla.

La camilla debe descansar sobre un suelo resistente y a nivel.

No se debe apoyar con todo el peso en un extremo de la camilla para evitar que bascule.

B) Regulación de la altura si procede:

Si es metálica en cada pata lleva un pulsador metálico, lo empuja y suba o baje la pata hasta se posicione y alcance la altura deseada.

Si es de madera afloje la pieza roscada y suba o baje la pieza de madera con agujeros y la posiciona enroscándola para que alcance la altura que desee.

C) REGULACION DE LOS DISTINTOS CUERPOS TAPIZADOS

1) Regulación mediante RESORTES DE GAS

Utilice ambas manos para cambiar el posicionamiento del cuerpo que desee, con una mano accione la palanca hacia arriba y a su vez con la otra mano súbalo o bájelo hasta la posición deseada, accione la palanca hacia abajo y quedará fijado.

2) Regulación Brazos, porta sueros, perneras.

Afloje el mango de sujeción y suba o baje hasta la posición deseada, apriételo y quedará fijo

3) Regulación barandillas:

Se suben y quedan aseguradas de forma automática, para plegarlas hay que desbloquear el seguro tirando del pomo

4) Manera de subir a la camilla.

Para subir a la camilla, haga que el paciente se acomode en la parte central y se siente o tumben. **ES MUY IMPORTANTE REPARTIR EL PESO**

\*Atención: El paciente no debe apoyarse en el cabezal o respaldo para darse impulso pues no está concebido para soportar tal presión.

G) Desplazamiento de la camilla si procede:

Para mover la camilla, cada rueda en la parte delantera superior lleva incorporada una lengüeta la cual accionándola hacia arriba queda liberada y puede rodar, accionada hacia abajo queda frenada y al estar así las cuatro, la camilla queda inmovilizada. ESTAS RUEDAS SON APROPIADAS PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS.

**IMPORTANTE: SE SIRVEN CON PATAS DESMOSNTADAS A FALTA DE FIJARLAS**

### **INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO**

A) Estructura.

Para conseguir un buen funcionamiento de la camilla es aconsejable retirar habitualmente el polvo limpiándola con un paño.

B) Tapicería:

Se recomienda quitar el polvo con un trapo húmedo, cuando no sea suficiente, limpie con agua, jabón neutro y una esponja suave, seque completamente con un trapo. Evite mojar con mucha cantidad de agua para que no penetre por las costuras.

Para una mejor protección frente a sudor, cremas o aceites de masaje, se recomienda el uso de una sábana protectora.

En el caso de manchas hay que tratarlas inmediatamente con agua jabonosa. **NO UTILICE ALCOHOL Y EVITE TODOS LOS DISOLVENTES, QUITAMANCHAS y CUALQUIER PRODUCTO ABRASIVO**, ya que estropean el tapizado.

El uso de lámparas de infrarrojos puede cuartear la polipiel. Para evitarlo, cubra con una manta de algodón, toalla o similar.

**NORMAS DE SEGURIDAD:**

El uso de la camilla puede resultar peligroso si recibe una manipulación inadecuada o distinta de la propia por parte de personal no cualificado.

Si lleva ruedas antes de colocar al paciente en la camilla asegúrese de que **LAS CUATRO RUEDAS ESTEN FRENADAS**.

Para subir a la camilla, haga que el paciente se acomode en el centro y se siente o tumbe. ES MUY IMPORTANTE REPARTIR EL PESO.

Nunca ajuste ningún cuerpo tapizado de la camilla cuando el paciente esté apoyado sobre ella con todo su peso. Al subir o bajar el respaldo asegúrese de que el paciente ni el terapeuta queden atrapados

El paciente no debe apoyarse en el respaldo para darse impulso pues no está concebido para soportar tal presión.

No se debe apoyar con todo el peso en un extremo de la camilla para evitar que bascule.

FABRICADO POR CasSalud Coop.V CIF F0410600

Polig ind Europa II c/ Villafamés S/N ave 27 12550 Almazora (Castellón)

