



Manual de uso
Cojín Conform





Productos suministrados

Cojín inflable CONFORM® con funda (revestimiento ignífugo - licra algodón o poliuretano), bomba manual y bolsa de transporte

Uso previsto

Los cojines CONFORM® Med. Air están diseñados para prevenir las úlceras por presión. También se pueden utilizar como tratamiento complementario en úlceras ya existentes en la zona del sacro. Este cojín está diseñado para personas con movilidad reducida o que tienen que permanecer sentados durante mucho tiempo (debido a paraplejia, espina bífida, accidente cerebrovascular, ELA [esclerosis lateral amiotrófica], EM [esclerosis múltiple]) o por otras razones.

Este producto se debe utilizar como asiento en una silla de ruedas. Su uso está destinado para humanos.

Los cojines CONFORM® Med. Air fabricados por Wolff Kunststoffe GmbH están disponibles

- 3 alturas de asiento diferentes (5; 7,5; 10 cm).
- Versiones de 1, 2 y 4 cámaras .
- Versión de 4 cámaras con válvula central.
- Todos los tamaños son estándar para utilizarlos en sillas de ruedas (Medidas ancho x profundidad).
- Tamaños personalizados bajo demanda.

Principio funcional

El cojín tiene una válvula para llenarlo de aire. Dado que las celdas de aire del cojín están conectadas entre sí por un sistema de canales, crean un sistema de comunicación que, distribuye la presión de manera uniforme y proporciona un alivio de presión al sentarse en el cojín. Debido a la forma de estrella de cada celda, se estabilizan entre sí una vez infladas. Las esquinas del cojín están diseñadas con ojales metálicos integrados para correas con el fin de fijar el cojín en la silla de ruedas.

Instrucciones de uso

La instalación debe ser realizada por personal de enfermería, consultor de dispositivos médicos, terapeutas ocupacionales u otra persona cualificada. Si el cojín se entrega en el hospital y se lo lleva a su casa, es necesario que la persona que lo esté usando y / u otras personas involucradas (familia, cuidado en el hogar) reciban instrucciones sobre el uso del cojín.

Duración de la aplicación - sin límite

Reutilización - lea las instrucciones de seguridad en la última página

Limpieza

Después de retirar la funda, se puede limpiar el cojín y desinfectarlo con un aerosol desinfectante o con un paño (recomendaciones www.rki.de). El cojín y la funda se pueden lavar a 60°C. Recomendamos un ciclo de lavado suave a 40º sin centrifugado después de cerrar las válvulas.

Para residencias y hospitales, existe un detergente especial llamado "Eltra 40 Plus", consulte el sitio del fabricante para obtenerlo (<https://de-de.ecolab.com>).

Garantía

Concedemos una garantía de 2 años a nuestros clientes por defecto de material o de fabricación.

Fabricante

Wolff Kunststoffe GmbH

Industriestraße 28

69509 Mörlenbach - Alemania

NIF: 007 248 13204

GLN (Global Location Number): 42 518157 0000 5


Nº de identificación a efectos de IVA: DE 144458680



Declaración CE


Los sistemas de cojines inflables CONFORM® cumplen todos los requisitos de productos médicos tal como se estipula en 93/42/EWG, fabricados en la CE

Cómo inflar el cojín

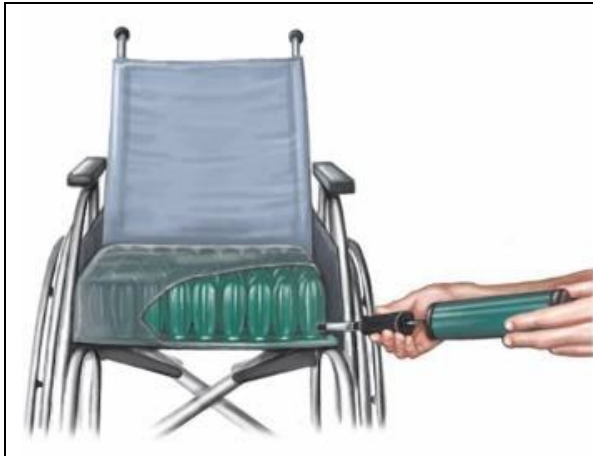

Inflar el cojín CONFORM® con la bomba que se adjunta hasta que empiece a arquearse. Sujetar el tubo de la bomba a la válvula del cojín. Abrir la válvula girándola hacia la izquierda e inflar el cojín. Cerrar la válvula girándola hacia la derecha.

Si fuera necesario, la persona también puede estar sentada sobre el cojín mientras se infla.

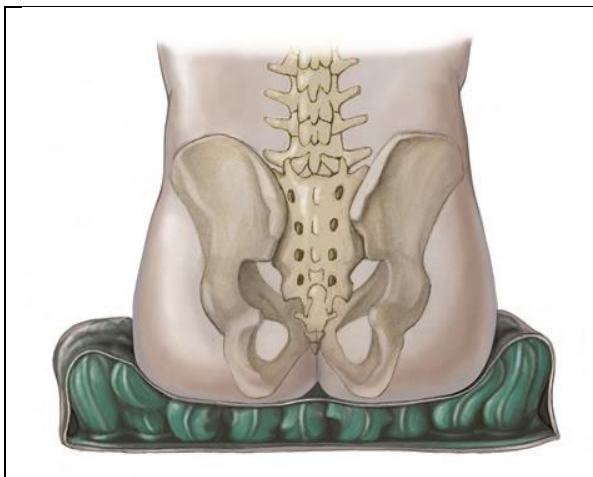

Sentar al paciente y desinflar el cojín. El paciente se hunde cómodamente pero no hay que dejar que las nalgas del paciente toquen la base del cojín.

La distancia entre la persona sentada (por lo general el coxis o tuberosidades isquiáticas) y la base del cojín debe ser de aproximadamente 3/4 de pulgada o 1,5 - 2 cm.



Se habrá ajustado correctamente si se puede meter la mano entre las nalgas del paciente y la base del cojín. Si todavía queda mucho aire dentro, puede abrir la válvula y desinflar un poco más. Si está demasiado desinflado, tiene que introducir más aire en el cojín.

aproximadamente 1,5 - 2 cm o 0,5 - 0,8 pulgadas de distancia

Instrucciones de seguridad

Uso - No utilizar nunca el cojín sin la funda. Debido a la estructura del cojín, la funda es necesaria para mantener la forma del cojín.

Cojín del asiento - Lado superior y placa inferior - Cuando se coloque el cojín en la silla de ruedas, comprobar que la placa plana del fondo se encuentre sobre la superficie de asiento de la silla de ruedas. El usuario se sienta sobre el lado superior (celdas)

Control, si hay aire dentro del cojín - Una vez al día se debe revisar el cojín si tiene aire dentro. Hay que volverlo a inflar cada 8 - 21 días.

Procedimiento de inflado del cojín - Inflar el cojín con la bomba que se adjunta en el paquete. Las bombas eléctricas pueden producir mucha presión interior y hacerlo explotar. Abrir la válvula con la mano y no con tenazas. Si se utiliza una herramienta la válvula puede estropearse, curvarse o atascarse.

Almacenaje - El producto está fabricado con goma natural y no debe exponerse a la luz solar (rayos UV) que podría provocar un envejecimiento prematuro del material. Si no se utiliza el cojín, recomendamos guardarlo dentro de su caja.

Limpieza - Después de quitar la funda, el cojín se puede limpiar utilizando un spray o un pañuelo desinfectante común (recomendaciones www.rki.de). El cojín y la funda se pueden lavar a 60 °C usando un detergente de higiene. Recomendamos un ciclo suave de lavado a máquina a 40 °C sin centrifugado después de cerrar las válvulas del cojín. Para hogares de ancianos y hospitales, hay un detergente especial disponible "Eltra 40 Plus", consulte al fabricante (<https://de-de.ecolab.com>).

Productos líquidos de limpieza - El producto empleado no debe contener aceite de silicona. Recomendamos el detergente en polvo Eltra 40 Extra.

Líquido para conservar el cojín - No necesario

Fuego lento y cenizas calientes - La funda del cojín es ignífuga. En caso de contacto con brasas, podría dañarse.

Traspaso del cojín a otra persona - En caso de que el cojín vaya a ser utilizado por otra persona tiene que ser desinfectado y lavado, aunque no haya suciedad aparente. Se debe comprar una funda nueva.

Adaptación óptima al asiento - La anchura y profundidad del cojín deben estar adaptadas a la silla de ruedas. Un cojín demasiado grande puede sufrir fugas. Si el cojín es demasiado pequeño no ofrecerá un alivio de presión óptimo al paciente.

Pérdida de aire - En caso de pérdida de aire, el cojín debe ser inflado de nuevo para comprobar la válvula. Si la válvula está correctamente cerrada, contacte con el especialista en atención sanitaria o con su proveedor de productos médicos.

Agujero en el cojín - Si hubiera un agujero en el cojín, contacte con su especialista en atención sanitaria o proveedor de productos médicos.

Mascotas - Si hay mascotas en su entorno, tenga en cuenta que podrían estropear el cojín.