



Ayudas Dinámicas

MANUAL DE USUARIO



ANDADOR POSTERIOR CON ASIENTO **SIMBA**

Este manual del usuario contiene información importante sobre la manipulación del producto. Para garantizar su seguridad al utilizarlo, lea detenidamente el manual del usuario.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Andador posterior con ruedas delanteras giratorias y traseras con bloqueo de la dirección de la marcha. Incorpora asiento que se puede plegar para su transporte, almacenamiento o para los casos que no requiera su uso. Adecuado para su uso tanto en interiores como exteriores (solo en superficies lisas y planas).

USO PREVISTO

El andador está diseñado para servir de apoyo a un niño o adulto mientras camina y también como asiento para descansar.

El peso máximo del usuario es según la talla del andador y está especificado en la etiqueta del producto.

Indicaciones de uso

El producto está diseñado para servir de apoyo y ayudar a los niños o adultos con movilidad reducida, con deterioro de la fuerza muscular y/o problemas de equilibrio, que necesiten apoyo adicional mientras caminan.

La capacidad cognitiva y la movilidad del usuario deben ser suficientes para un uso seguro.

Contraindicaciones

El producto no está diseñado para que lo utilicen personas con problemas graves de equilibrio o alteraciones perceptivas funcionales.

TALLAS Y MEDIDAS



Referencia	Talla	Altura puños	Ancho total	Ancho entre puños	Peso	Peso máximo
KA1200	Infantil	41 a 51 cm	59 cm	33 cm	4 Kg	30 Kg
KA2200	Junior	52 a 68 cm	62 cm	34 cm	5 Kg	40 Kg
KA3200	Juvenil	62 a 81 cm	63 cm	39 cm	7 Kg	70 Kg
KA4200	Adulto	76 a 96 cm	70 cm	42 cm	7 Kg	90 Kg

ANTES DE USAR EL PRODUCTO

- Antes de su uso, compruebe la funcionalidad general del producto.
- Antes de su uso, compruebe si el producto presenta algún defecto. No utilice el producto si presenta algún defecto.

Ayudas Tecno Dinámicas da por supuesto que un profesional sanitario ha realizado una evaluación individual del usuario para determinar su nivel de riesgo o sus necesidades terapéuticas. Que el vendedor y cuidadores han determinado que proporcionará la ayuda requerida y sus ajustes resultan adecuados para el usuario. También que un profesional sanitario ha formado adecuadamente al cuidador y al usuario sobre la utilización del producto correctamente y de forma segura.

VIDA ÚTIL

La vida útil prevista para este producto es de cinco años, siempre y cuando se utilice diariamente y de conformidad con las instrucciones de seguridad, se respeten los intervalos de mantenimiento y se utilice correctamente según lo establecido en este manual. La vida útil real puede variar en función de la frecuencia y la intensidad del uso.

INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD


El andador está disponible en cuatro tamaños diferentes. Se utiliza como andador posterior y está disponible con una serie de accesorios.

El andador se puede usar al aire libre, pero está restringido a terrenos suaves y uniformes sin obstáculos. Los ejemplos de tales terrenos pueden incluir caminos, aceras y parques infantiles.


El andador no debe usarse en terreno irregular o irregular, en condiciones fangosas o sobre hierba o grava.

- Los niños que utilicen los andadores deben ser supervisados a un nivel adecuado dependiendo de su capacidad individual.
- Consulte siempre a sus profesionales sanitarios para que le aconsejen cómo utilizar el andador con seguridad.
- No utilice los bloqueos de rueda y/o marcha atrás sin instrucción profesional.
- No lo utilice en escaleras ni en escaleras mecánicas.
- No se ponga de pie sobre el producto.
- Tenga cuidado al caminar por superficies inclinadas, suelos resbaladizos o superficies irregulares.
- Evite los obstáculos que puede encontrar durante la marcha.
- No utilice el andador para transportar personas.
- Tenga cuidado de que las prendas no queden atascadas entre las ruedas.
- No cuelgue ninguna carga, por ejemplo bolsos, en el chasis, las empuñaduras, etc. del andador.
- Los componentes del producto pueden calentarse si se exponen a temperaturas elevadas (superiores a 41 °C). Tenga cuidado si el producto se expone a altas temperaturas, por ejemplo, a la luz solar directa.
- No guarde el producto en entornos mojados o húmedos.
- Antes de su uso, compruebe la funcionalidad general del producto.
- Antes de su uso, compruebe si el producto presenta algún defecto.
- No utilice el producto si está defectuoso.
- No use el andador para ponerse de pie si está sentado.


PARTES DEL ANDADOR:

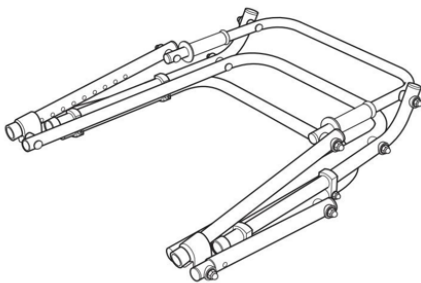

Chasis del andador

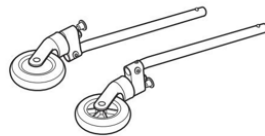


Ruedas delanteras direccionales (par)

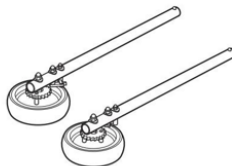


Ruedas traseras con antirretroceso (par)

ACCESORIOS OPCIONALES DISPONIBLES:

Empuñaduras con soporte antebrazos

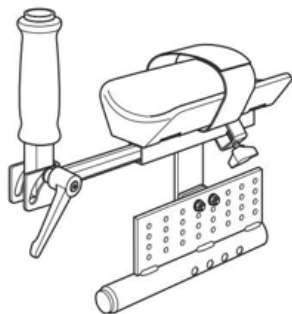


Estabilizador pélvico

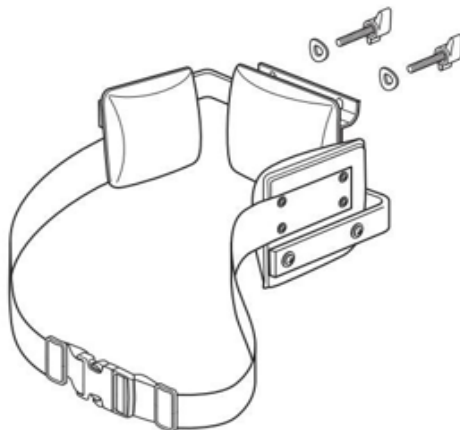




MONTAJE DEL ANDADOR:

a:

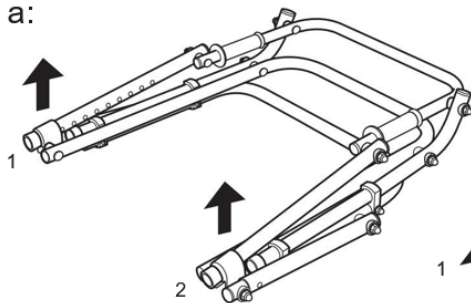

b:

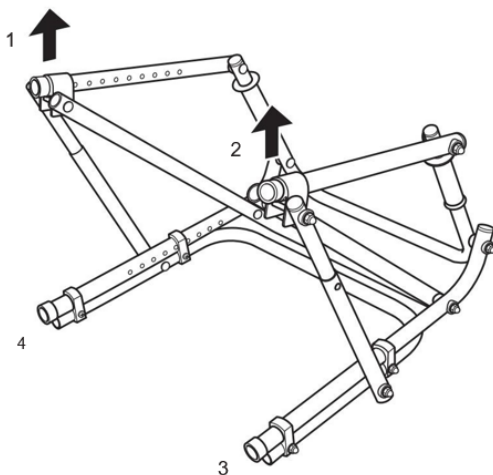

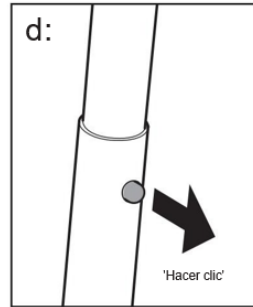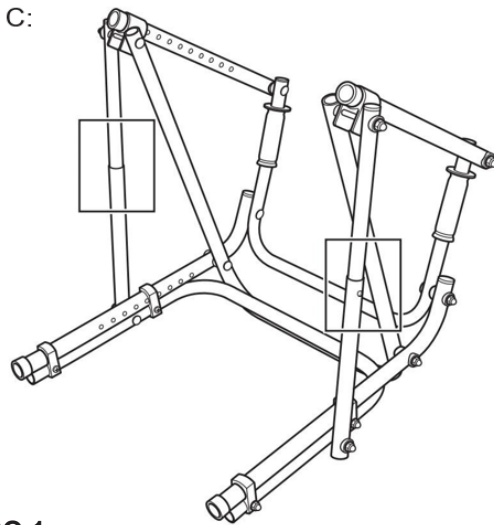



PASO 1

El andador tiene un chasis tubular de aluminio plegable que es ajustable en altura a través las patas.

Para abrir el andador: coloque el chasis en el suelo con las patas delanteras (1 y 2) en la parte superior (a).

Mientras sujeta las patas traseras (3 y 4), tire hacia arriba de las patas delanteras 1 y 2 (b). Cuando el andador esté completamente abierto (c), debe escuchar un 'clic' esto indica que ambos botones salten a su posición; vea el detalle (d).


Advertencia: asegúrese de que ambos botones estén en su posición antes de continuar.

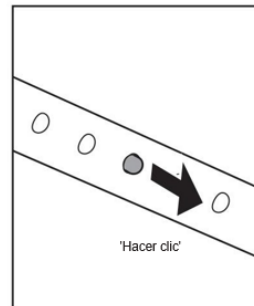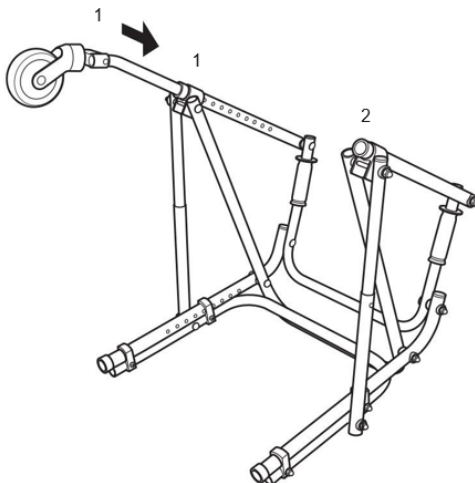

PASO 2

Monte las dos ruedas delanteras tal como se muestra el gráfico. Para colocar las ruedas: coloque la primera rueda (1) empujándola en el marco en la posición 1. Empuje hasta que el botón salga de uno de los agujeros. Repita para la otra rueda delantera 2.


Nota: es posible que deba girar el tubo ligeramente hasta que salte el botón.

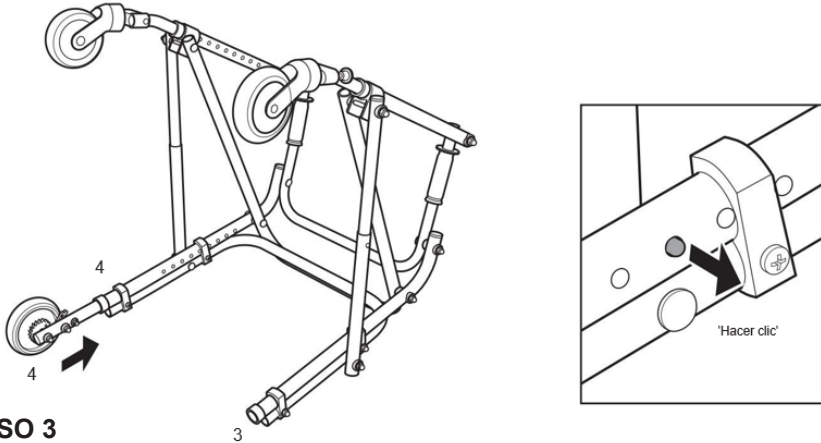

PASO 3

Repita el mismo procedimiento con las dos ruedas traseras 3 y 4, tal como muestra el grafico. Empuje hasta que el botón salga de uno de los agujeros.


Nota: es posible que deba girar el tubo ligeramente hasta que salte el botón.

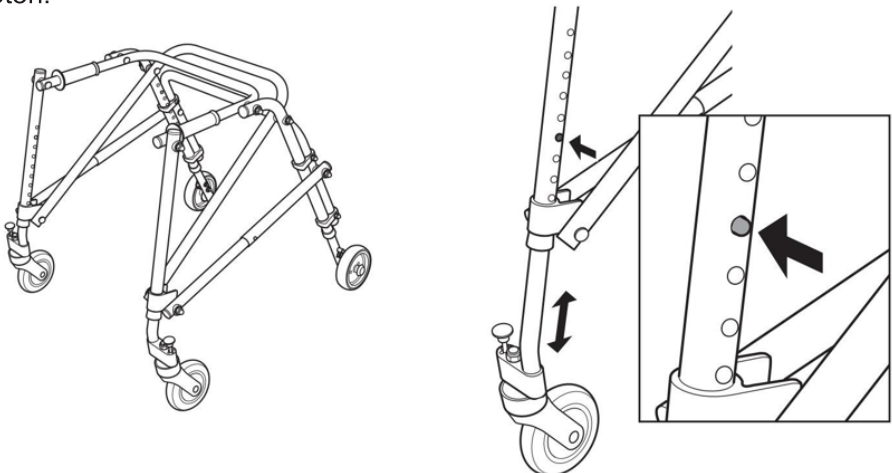

PASO 4


Levante el chasis y colóquelo sobre sus ruedas. Las ruedas delanteras y traseras tienen varias posiciones de altura.

Para ajustar la altura: presione el botón (flecha) y mueva la rueda a la posición del orificio requerido. Asegúrese de que el botón salte a su posición en el chasis, debe escuchar un "clic". Repita para las otras 3 ruedas asegurándose de que entren en los orificios de la misma altura y que el botón salte a su posición.

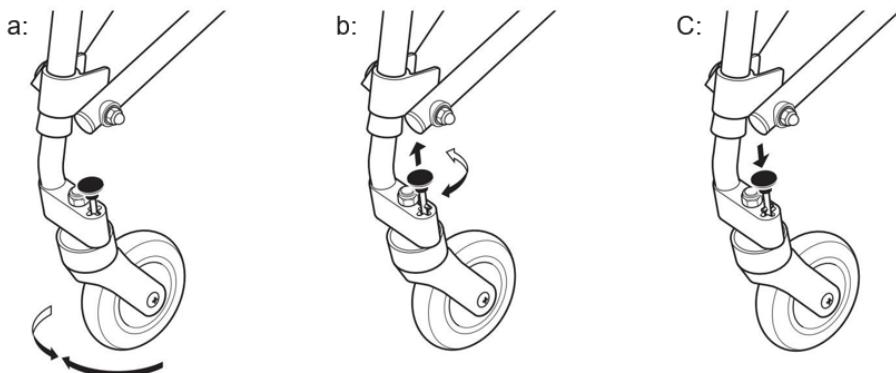

BLOQUEO DE DIRECCIÓN DE LAS RUEDAS DELANTERAS

Las ruedas delanteras se pueden bloquear en una posición hacia adelante. Para bloquear las ruedas delanteras: ajústelas para que apunten hacia adelante (a), levante el pasador de bloqueo y gírelo 90° en cualquier dirección (b), suelte el pasador para bloquear las ruedas (c). Para desbloquear las ruedas repetir la operación.

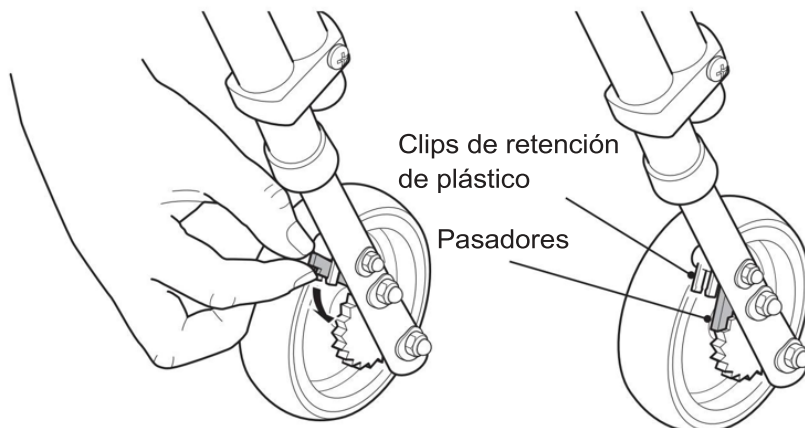


BLOQUEO MARCHA ATRÁS DE LAS RUEDAS TRASERAS

Las ruedas traseras se pueden bloquear para evitar que la silla ruede hacia atrás.

Para bloquear las ruedas traseras: suelte los pasadores de metal de los clips de retención de plástico. Deje que los pasadores caigan en su posición sobre los dientes de las ruedas. Para desbloquear las ruedas, vuelva a colocar los pasadores en los clips de plástico.

Advertencia: Los frenos solo evitarán que el andador ruede hacia atrás, el andador aún puede moverse hacia adelante.



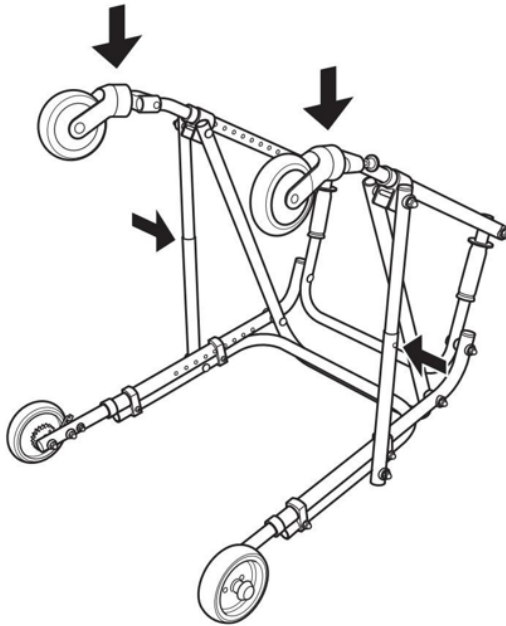


PLEGADO DEL ANDADOR

Para plegar el andador: presione los dos botones en el tubo transversal (flechas) y presione las ruedas delanteras hacia abajo. Es posible que deba girar las ruedas ligeramente para cerrar el andador por completo.

MONTAJE DE ACCESORIOS OPCIONALES


MONTAJE EMPUÑADURAS CON SOPORTES DE ANTEBRAZOS (OPCIONAL)

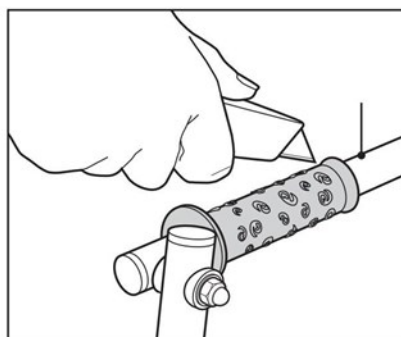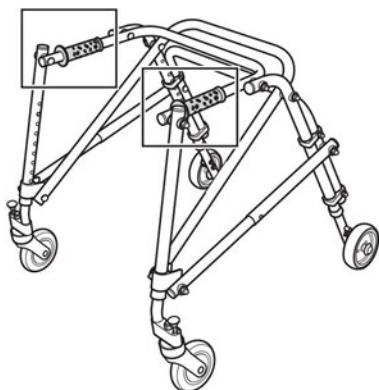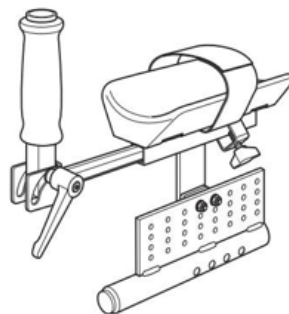

PASO 1

Extracción de las empuñaduras: las empuñaduras vienen instaladas de fábrica y están ajustadas; será necesario cortarlas con un cuchillo afilado antes de poder colocar la plataforma del antebrazo.


Con cuidado, con un cuchillo afilado, haga un corte a lo largo de la empuñadura, retire la empuñadura y retírela del pasamanos. Las empuñaduras no se pueden reutilizar y deben desecharse.

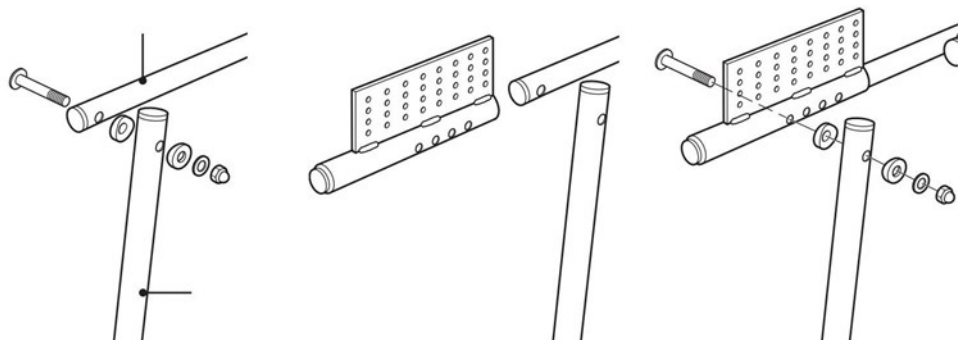

PASO 2

Para colocar los soportes del reposabrazos: retire la tuerca, la arandela, el espaciador, el perno y el espaciador central del pasamanos (a). Deslice el soporte del reposabrazos, hay cuatro orificios para el ajuste (b).

Alinee uno de los orificios en el soporte del reposabrazos, empuje el perno a través del soporte del reposabrazos, deslice el espaciador central y el montante sobre el perno y asegúrelo con el espaciador, la arandela y la tuerca (c). Repita para el otro lado asegurándose de usar el mismo orificio en el soporte del reposabrazos.

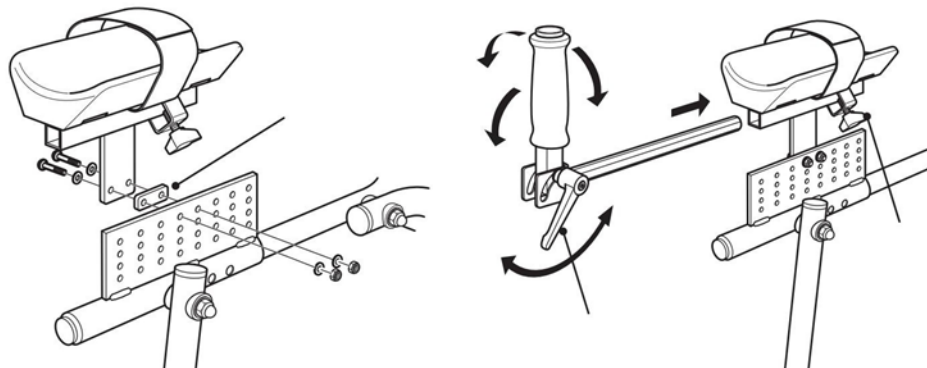


PASO 3

Perno en el reposabrazos. El reposabrazos viene con 2 espaciadores para ajuste lateral, estos deben encajar entre el reposabrazos y el soporte del reposabrazos según sea necesario. Fije el brazo al soporte del reposabrazos con las tuercas, tornillos y arandelas suministrados.


Deslice las empuñaduras a la posición requerida y apriete con el pomo en la parte inferior. Las empuñaduras también se pueden girar deslizándolas hacia afuera, girando y deslizándolas hacia adentro, apriete el pomo. Las empuñaduras se pueden inclinar hacia adelante según sea necesario soltando la palanca, ajustando la empuñadura y volviendo a apretar.

MONTAJE DEL ESTABILIZADOR PÉLVICO (OPCIONAL)

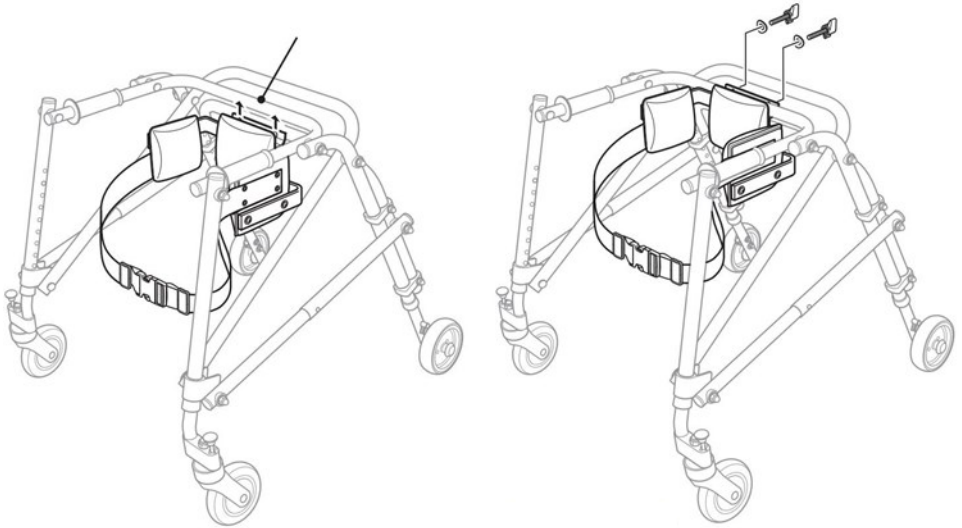

Coloque el estabilizador pélvico debajo de la parte posterior del tubo del trasero, como se muestra.

Alinee los orificios y fije desde atrás con las arandelas y los pernos de fijación, apriete los pernos de fijación solo con la mano.

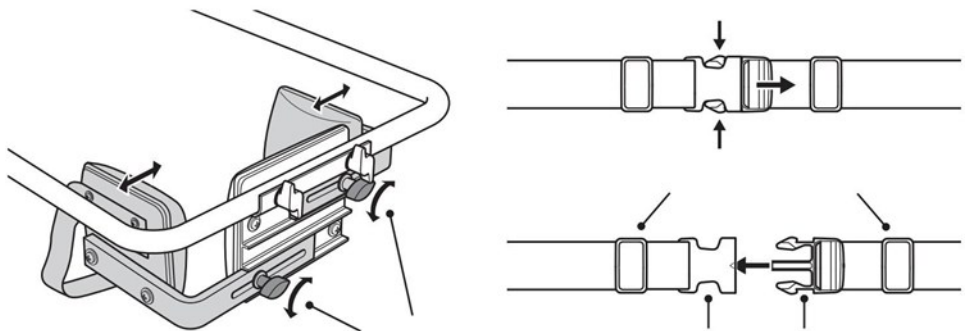

Para ajustar el estabilizador pélvico: Afloje los dos pomos de ajuste que se muestran y coloque las almohadillas laterales según sea necesario. Vuelva a apretar los pomos de ajuste.

a: Para soltar la hebilla: Presione en el dos puntos que se muestran y tire del clip y enganche para separarlo.

b: Para asegurar el arnés: Inserte el clip en el pestillo.

Para ajustar el arnés: Deslice la correa a través de las hebillas de ajuste para ajustar la longitud según sea necesario.

LIMPIEZA

Seguir métodos erróneos o utilizar líquidos de limpieza incorrectos puede dañar o deteriorar el producto.

-Todos los productos de limpieza y desinfectantes empleados deben ser eficaces, compatibles entre sí y deben ser compatibles con los materiales que se van a limpiar.

-Nunca utilice líquidos corrosivos (álcalis, ácidos, etc.) ni productos de limpieza abrasivos.

Recomendamos usar un producto de limpieza doméstico normal, como líquido lavavajillas.

-No utilice disolventes (decapantes de celulosa, acetona, etc.) que cambien la estructura del plástico o disuelvan las etiquetas adheridas.

-Asegúrese siempre de que el producto se ha secado por completo antes de utilizarlo de nuevo.

MANTENIMIENTO

Para garantizar un funcionamiento y una seguridad óptimos, inspeccione el producto periódicamente.

-Compruebe que todos los tornillos y ajustes estén correctamente apretados.

-Inspeccione el chasis y las piezas cargadas por si presentan grietas.

-Compruebe si las ruedas están bien ajustadas, desgastadas o dañadas.

-Asegúrese de que las ruedas están libres de pelos u otro tipo de suciedad.

-Compruebe regularmente el buen funcionamiento de los juegos de ruedas y evite que las ruedas se ensucien. Limpiar regularmente a mano con un paño húmedo.

-No utilice detergentes abrasivos. Los solventes pueden dañar el recubrimiento y la superficie de Partes plásticas.

-Las uniones metálicas y atornilladas deben revisarse regularmente y asegurarse de que son estables. Si es necesario, vuelva a apretar los tornillos.

-Los botones de bloqueo deben revisarse minuciosamente. Póngase en contacto con su distribuidor inmediatamente si los botones no funcionan correctamente.

-El cojinete y la banda de rodadura de cada rueda se desgastarán de manera diferente dependiendo del ambiente, peso de los usuarios, estilo de caminar y tipo de uso. Compruebe regularmente si hay desgaste y reemplácelo si es necesario. La rueda debe lubricarse regularmente.

-Después de su uso en áreas muy embarradas, etc., las ruedas y las piezas asociadas deben lavarse para eliminar el exceso de suciedad.

ELIMINACIÓN

Proteja el medio ambiente y recicle este producto a través de la planta de reciclaje más próxima cuando llegue al final de su vida útil.

Desmante el producto y sus componentes para separar y reciclar individualmente los diferentes materiales.

La eliminación y el reciclaje de los productos usados y de sus embalajes debe llevarse a cabo conforme a las normativas legales relativas al tratamiento de residuos vigentes en cada país. Póngase en contacto con su empresa de gestión de residuos local para obtener más información al respecto.

REACONDICIONAMIENTO

El producto se puede reutilizar. Para reacondicionar el producto para un nuevo usuario, lleve a cabo las siguientes acciones:

- Inspección
- Limpieza y desinfección

Asegúrese de que el manual del usuario se entregue con el producto.

Si se detecta algún daño o un funcionamiento deficiente, no reutilice el producto.



Sunshine Healthcare Co., Ltd
No. 31 Jihua Eastern road, Nanhai, Foshan, China



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076DE, Amsterdam, Netherlands, SRN: NL-AR-000000247

GARANTÍA

La garantía se extiende según la Ley vigente de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.

En el caso que requiera una reparación de su producto, póngase en contacto con el distribuidor que se lo vendió. A través de él, la fábrica le proporcionará todo el soporte de su garantía.



Ayudas Tecno Dinámicas S.L.

c/Llobregat 12, Santa Perpètua, 08130, Barcelona

Tel. 935 74 74 74 Fax. 935 74 74 75

info@ayudasdinamicas.com, www.ayudasdinamicas.com

