



Nebulizador a ultrasonidos para aerosolterapia MD6026P

Art. MD6026P

El Nebulizador de ultrasonido LAICA MD6026P para aerosolterapia garantiza una nebulización rápida y extremadamente silenciosa. Fácil de usar, gracias a su silencio, es la solución ideal para los niños.

El dispositivo ultrasónico convierte la energía eléctrica en vibraciones de alta frecuencia, utilizando un transductor, estas vibraciones se transmiten a la superficie de la solución, creando una onda estacionaria que atomiza el medicamento.

- Muy silencioso
- Rápido
- Desconexión automática

No use productos oleosos como cortisonas o aceites esenciales con una viscosidad superior a 3 cP (centiPoise = unidad de viscosidad) y medicamentos en forma de suspensiones, ya que pueden dañar el transductor.

DIMENSIONES 15 x 12.2 x 9.5 cm

PESO 0.53 kg

CÓDIGO DE BARRAS 8013240200804

COMPONENTES DEL PRODUCTO 1 nebulizador, 1 Mascarilla para adultos, 1 Mascarilla para niños, 1 Adaptador bucal, 1 adaptador para mascarillas, 40 Ampollas, 1 Tubo de conexión de aire, 1 transformador, 1 Manual de instrucciones

RECAMBIOS DISPONIBLES

- Set compuesto da mascarilla para adultos, mascarilla para niños, Tubo de conexión de aire y adaptador bucal ANE054
- Set compuesto de 40 ampollas ANE046
- Tubo de conexión de aire ANE055

ALIMENTACIÓN con transformador: Input 100-240V 50/60Hz 0.35A / Output: 12V 1A

RUIDO A 1 METRO 40 dB

**DIMENSIÓN MEDIA
DE LAS PARTÍCULAS** $\leq 5 \mu\text{m}$

**FLUJO DE LA
NEBULIZACIÓN** Aproximadamente 0,4 ml/min

**CAPACIDAD
AMPOLLA** max 8 ml