



Airwheel H3S

ES MANUAL DE USUARIO

Diagrama



Lista de empaque

H3S	1 unidad	Cargador	1 unidad
Manual	1 unidad	Accesorios	1 unidad


guía de desembalaje:

1.Retire la caja de accesorios en la parte trasera de la silla de ruedas

Abra el paquete y sacar la silla de ruedas, y suavemente colóquela en el suelo, retire la caja de accesorios en la parte trasera de la silla de ruedas (Figura 1-1) y quite el cartón encima de la palanca de embrague y ajuste las palancas de embrague izquierda y derecha al modo de motor (Figura 1-2). En la caja de accesorio, tiene el cargador, el controlador, el trasero soporte de pie,el manual, los lazos, y otras herramientas.



1-1

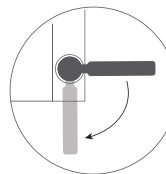

Modo de mano

palanca de embrague

Modo de batería




1-2

2.Encienda el poder

Después de completar los pasos anteriores, encienda la alimentación. El interruptor de encendido y el puerto de carga se encuentran detrás de caja de batería (Figura 2-1).

Puerto de carga

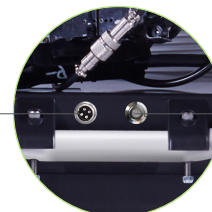

Interruptor de encendido


2-1

3.Retire el controlador y ampliar silla de ruedas

Llevar el controlador de la caja de accesorios, bajo el estado de apagado, mantener presionado 3 segundos el botón de aumentar/extender ① en el controlador(Figura 3-1), y libere este botón cuando el panel de control se ilumina y tiene el sonido "bit", deja la silla de ruedas desplegarse automáticamente, y cuando se completa, pulse el botón ③ para salir del modo de plegar. Mantener presionado el botón de disminuir/contraer ② para plegarse.

② marcha- (desacelerar) /Contraer

③ Salga del modo de extensión/contracción

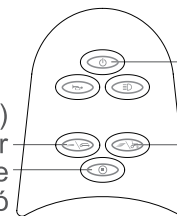

Encendido / ④ apagado

marcha + / ① Extender

3-1

4.Instalación de un controlador


Después de desplegar la silla de ruedas, instale el controlador. Dependiendo del habito el usuario puede seleccionar con flexibilidad en instalar en el pasamanos izquierdo (derecho) (Figura 4-1), después de instalado, fije el cable del controlador con el lazo. A continuación, puede sentarse en la silla de ruedas, encienda la alimentación ④ como en figura 3-1 se muestra, listo para usar.



4-1

Nota:

Si se produce algun problema debido a las piezas eléctricas deficientes, y la silla de ruedas no puede desplegar y plegar, debe usar las herramientas en la caja, remover los tornillos en partes Figura 5-1 (ubicada en la parte trasera de la silla) , luego puede manualmente desplegar y plegar la silla de ruedas.

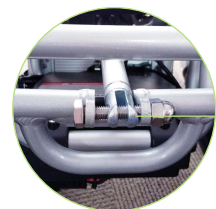

Tornillo


5-1

Antes de cargar, conectar primero el cargador de batería con el vehículo, y luego conectar a la alimentación de CA; Al cargar, la ranura de conector del cargador (Figura 6-1) debe estar alineado con las partes salientes en puerto de carga (figura 6-2), se inserta y luego apriete la tapa de fijación. Por favor, al extraerlo, primero aflojar la cubierta, a continuación, desenchufar el cargador.



ranura

6-1

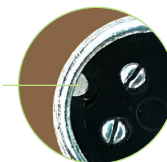

parte saliente

6-2

Introducción del producto

1. Este producto está diseñado para operación simple del usuario.
2. El reductor de doble tracción trasera está utilizada para asegurar la conducción estable y fiable.
3. Controlador avanzado, sistema operativo fácil.
4. El diseño del asiento cumpliendo con la Ingeniería Humana proporciona al usuario suficiente comodidad.
5. Toda la silla de ruedas H3S se puede plegar y los pedales se pueden desmontar, fácil para el paquete, el transporte y almacenamiento en el hogar.

Instalación y uso

3. Puerto de carga



4. Interruptor de encendido
Cuando el indicador está encendido, H3S está encendido, y cuando está apagado, H3S está apagado.



1. Luz delantera

2. Instalación del controlador

Inserte la barra de fijación del controlador en el tubo cuadrado y ajustar la posición de controlador a la apropiada posición, y apriete el perno de fijación para sujetarlo.



Consejo: Por favor apague la alimentación para evitar que la batería se descargue demasiado si el usuario no la usa.

Especificaciones

Los principales parámetros técnicos

Tamaño	1100X620X980mm	peso corporal	~35kg
Tamaño plegado	890X620X400mm (tamaño del controlador no incluido)	carga máxima	130kg
radio de giro	1.2m	Marco	Aleación de aluminio 6061
velocidad máxima de estándar	6Km/h	capacidad de escalada	cerca de 8°
capacidad de frenado	≤ 1.5m	Capacidad de pendiente	cerca de 8°
Tiempo de carga	cerca de 5H	batería	litio 25.2V 524Wh
Caja de engranajes de reducción	Engranaje de gusano proporción de reducción 1: 32	Temperatura aplicable	-15°C ~50°C
Capacidad de pasar por obstáculos	<40mm	capacidad de pasar por zanja	<100mm
rueda delantera	8 pulgadas	rueda trasera	12.5 pulgadas Neumático inflable
Motor	motor de cepillo de doble tracción con interruptor del embrague. Potencia: 200W; Voltaje: 24V; velocidad de rotación: 3776rpm		
función de plegarse de forma automática	se puede plegar y desplegar automáticamente sólo presionando un botón		

Advertencia

Por favor, no tirar las baterías de desechos, a fin de no contaminar el medio ambiente. La batería litio de residuos del producto es para ser reciclada por la empresa o el comerciante, y los puntos de venta designados por el gobierno.


Las instrucciones del controlador

LED luz de 5 niveles para visualización del volumen de carga

Botón de bocina

marcha- (desacelerar)/Contraer

Salga del modo de extensión/contracción

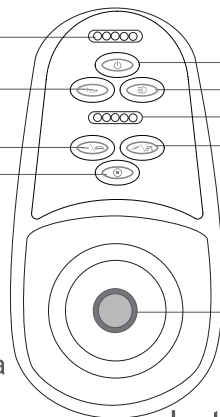

Encendido / apagado

Luz delantera

Indicador de velocidad

marcha + / Extender

palanca de operación de direcciones

• Encendido / apagado

Asegúrese de que el botón de encendido de caja de batería esté encendido y la silla de ruedas esté desplegada, luego presione el interruptor de encendido en el controlador para estar listo para conducir o controlar a distancia. Presiónelo nuevamente para apagar el modo listo de conducir.

Nota: El interruptor de encendido del controlador no se puede encender cuando la silla de ruedas está completamente plegada. Encienda primero la caja de batería, despliegue la silla de ruedas y encienda el interruptor de encendido del controlador para estar listo para conducir.

• Interruptor de luz delantera

Asegúrese de que tanto la alimentación de la caja de batería como el controlador estén encendidos, luego presione el interruptor de luz para encender luz delantera y presiónelo nuevamente para apagarla.

• botón de bocina

presione este botón, y hace sonar el zumbador; suéltelo, y zumbador deja de sonar.

• marcha- (desacelerar)/Contraer

En el estado de apagado, presione el botón durante 2 segundos, la silla entra en modo de extensión / contracción. Libérela para contratarse. En el modo de extensión / contratación, haga clic en el botón para detener la contratación si se está contrayendo. Cuando la extensión está parada, haga clic para contraer.

En el modo listo, modo de control remoto y modo de conducir, haga clic en el botón de marcha para disminuir una marcha.

• marcha + / Extender

En el estado de apagado, presione el botón durante 2 segundos, la silla entra en el modo de extensión / contracción. Suéltelo para extender.

En el modo de extensión / contratación, haga clic en el botón para detener la extensión si está extendiendo.

Cuando la contratación se detiene, haz clic para extender

En el modo listo, modo de control remoto y modo de conducir, haga clic en el botón de marcha para aumentar una marcha.

• Luz LED de 5 niveles para indicador de batería

Se utiliza a mostrar el porcentaje de capacidad restante AH de batería, cada segmento representa el 20% de capacidad de batería, y cuando un segmento no se ilumina, esto significa que se ha gastado el 20% de la capacidad de batería; y cuando dos segmentos no se iluminan, esto significa que se ha gastado el 40% de la capacidad de batería, y así sucesivamente; cuando 2-3 segmentos no se iluminan, a lo mejor, debe cargar el vehículo, lo que es útil para prolongar

la vida de la batería; cuando sólo un segmento se ilumina, batería está en estado de alerta y se prohíbe el uso continuo, y si continua usándola, puede causar la sobre-descarga de la batería , que daña la vida de la batería. La exactitud de muestra de los 5 segmentos se reducirá con el tiempo de uso de la batería .

• Salga del modo de extensión/contracción

En el modo de extensión / contratación, haga clic en el botón para detener la extensión o contracción. Entra en el estado de cierre.

• Indicador de velocidad

En el modo listo para conducir, presione el botón de aceleración, las luces LED del indicador de velocidad se encenderán una a una, presione el botón de bajar la velocidad, las luces LED del indicador de velocidad se apagarán una por una.

- Estado de apagado: la conexión del circuito está completa, el interruptor de encendido de la batería está encendido. Pero el botón de encendido/apagado en la caja de control no está presionado y la luz indicadora no está encendida.
- Estado de espera: presione el botón de encendido/apagado en la caja de control, la luz indicadora se encenderá, pero sin ninguna operación hecha por el hombre.
- Estado de conducción: presione el botón de encendido/apagado en la caja de control, la luz indicadora se encenderá y use la palanca de operación para hacerla que se mueva.

Cómo usar el controlador

El controlador sirve para operar la H3S a mover hacia adelante, hacia atrás, girar a la izquierda y derecha, acelerar, desacelerar y detener. Después de abrir el interruptor de encendido, empujar de forma vertical hacia adelante la palanca de operación, y la H3S se mueve hacia adelante. Cuando la empuja hacia adelante más, la velocidad es más rápida. Cuando suelta la palanca de operación, se desacelerará el vehículo, cuando la suelta totalmente y la palanca de operación se restablece, se detiene la H3S y está en el estado de frenado. Cuando tira hacia atrás la palanca de operación, se mueve el vehículo hacia atrás. Cuando la tira hacia atrás más, la velocidad hacia atrás es más rápida. Cuando suelta la palanca de operación, se desacelerará el vehículo y cuando la suelta totalmente, la palanca de operación se restablece, H3S se detiene y está en el estado de frenado.

Del mismo modo, cuando empuja la palanca de operación hacia izquierda o derecha, la H3S mueve hacia izquierda o derecha. Cuando la empuja más, tiene más rápida velocidad. Cuando suelta la palanca de operación, se desacelera el vehículo. Cuando la suelta completamente y la palanca de operación se restablece, el vehículo deja de moverse, y está en el estado de frenado.



Mover hacia adelante:

Empujar la palanca de operación hacia adelante, y la H3S se mueve hacia adelante.



Mover hacia atrás:

Empujar la palanca de operación hacia atrás, y la H3S se mueve hacia atrás.



Mover hacia izquierda:

Empujar la palanca de operación hacia izquierda, y la H3S se mueve hacia izquierda.




Mover hacia derecha:

Empujar la palanca de operación hacia derecha, y la H3S se mueve hacia derecha.

Operar la palanca de embrague

Tire la palanca de embrague a la posición abierta, luego el freno de H3S no funcionará, la H3S puede ser empujado por la gente (no importa si H3S está encendido o apagado, la gente puede hacerlo), cuando tira la palanca de embrague a la posición de cierre, nadie puede empujar H3S.

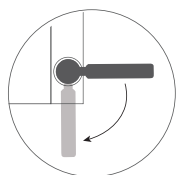

Modo de batería

Modo de mano




palanca de embrague

El modo de mano, tirarlo en sentido antihorario para frenarlo,
El modo de batería, tirarlo en sentido horario para frenarlo.



Modo de batería

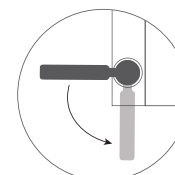

Modo de mano



palanca de embrague

El modo de mano, tirarlo en sentido horario para frenarlo,
El modo de batería, tirarlo en sentido antihorario para frenarlo.



La palanca del embrague mecánico tiene que estar en modo eléctrico, lo que significa que H3S está frenando, y luego el usuario puede conducir H3S. Se prohíbe usar esta función, en pendiente hacia arriba y atrás para garantizar seguridad del usuario y H3S.

instalación soporte de pie




7-5



7-1

Tornillo

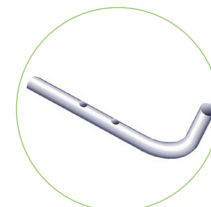

7-2



7-3



7-4

Alojar los tornillos en la parte superior del orificio de motor (Figura 7-1), y sacar el soporte de pie (Figura 7-2), (Figura 7-3) insertar el soporte de pie en el agujero del motor, y luego apretar el tornillo, después de la instalación de un lado , la instalación del otro lado es igual(Figura 7-5). uso final de soporte de pie H3S (Figura 7-4).

Seguridad

Lea atentamente el Manual de usuario y siga los requisitos de conducción durante el recorrido en H3S. Por favor, no la utilice hasta que el usuario haya leído el Manual del Usuario cuidadosamente y haya aprendido bien el funcionamiento. No lo preste a aquellos que no pueden manipular esta H3S.

Nota Importante:

Es necesario mucha práctica para captar la habilidad antes de manejar H3S de forma segura. Si no eres experto o no sigues el manual del usuario de este producto, puede causar lesiones o pérdida de propiedad del usuario o otras personas. Nuestra compañía sólo toma la responsabilidad por defectos o daños del producto y NO somos responsables de lesiones personales o pérdida de propiedad relacionadas con el uso del producto.

Requisitos antes de usar el producto:

1. Debe conocer y cumplir con las leyes locales de tráfico.
2. H3S pertenece al vehículo no motorizado y está diseñado especialmente para ancianos y personas con problemas de movilidad. No se necesita licencia de conducir de acuerdo con la ley de tránsito, pero el conductor de H3S tiene que cumplir con las mismas reglas de tránsito que se aplican a los peatones. Por favor, conduzca H3S en carril peatonal o carril para bicicletas.
 - ① Debe conocer las señales de tráfico de peatones.
 - ② Al conducirlo en el camino, no girar de repente para cruzar el camino.
3. Operación de práctica.

Antes de operar el vehículo por primera vez, debe conocer las diversas funciones del vehículo. Debe practicar las operaciones de mover hacia adelante, acelerar, desacelerar, parar, retroceder, viajar en cuesta arriba, cuesta abajo, girar, etc, en lugares seguros con buena condición de tierra y poca gente, y después de dominar bien toda la operación y luego puede manejarlo en camino.
4. Cuando viaje por primera vez en la carretera, si es posible, por favor ir acompañado por alguna persona familiarizada con este vehículo, para garantizar la seguridad.

5. Las personas bajo efecto de alcohol, de fatiga excesiva o con limitado comportamiento o reactividad no deben conducir esta H3S para garantizar la seguridad.
6. Por favor asegúrese de que el usuario no tiene ninguna enfermedad mental, ni otras enfermedades que son posibles de aparecer de repente durante la conducción, y el usuario no debe tener ninguna condición de ser posible de perder la capacidad operativa a usar esta H3S seguramente.
7. Si usted está tomando medicamentos, consulte con su médico si el medicamento tendrá afecto negativo a su uso seguro de la H3S .
8. Debe revisar si la condición del vehículo está buena, por ejemplo, si el freno y varias propiedades son normales, si la silla está fijada, si la batería está en buen estado de alimentación.
9. No debe modificar este vehículo sin autorización de nuestra empresa.



- En ningún momento, el sistema eléctrico del vehículo no debe estar expuesto a un ambiente húmedo (tales como lluvia, nieve, niebla, etc.), no lavar el vehículo con agua, porque esto puede dañar el sistema eléctrico. Como ya está mojado, sólo podría usarse después de haber sido secado y confirmado para buenas condiciones.
- No conducirlo en malas condiciones climáticas, tales como lluvia, nieve, niebla, vientos fuertes, temperaturas por debajo de -20 °C o por encima de 40 °C , y así sucesivamente. Si conducirlo en esta conducción, puede haber daños en el sistema eléctrico, causando fallo de control.
- No conducirlo en desierto, arena ni caminos con lodo, agua estancada, hielo o camino muy liso, tierra salina a fin de no afectar el rendimiento de la conducción del vehículo.

Atenciones durante la operación:

1. Esta H3S es para un sólo usuario, no debe llevar pasajeros.
2. Este producto no puede usar como un equipo de mover o cargar cargas.
3. El usuario debe sentarse en la silla y manejar la palanca de operación con mano para conducirlo.
4. No haga conducción serpentina, giros bruscos de alta velocidad, no incline el cuerpo, para evitar el vuelco del vehículo.
5. En terreno irregular o inestable (como hierba), calles concurridas, centros comerciales parques, por favor mantener alta atención, debe reducir la velocidad y viajar a velocidad baja.
6. Durante la conducción, no debe usar teléfonos móviles ni otros dispositivos de comunicación inalámbrica. Estos dispositivos sólo pueden ser utilizados cuando detiene la H3S en un lugar seguro y corta la fuente de alimentación
7. Cuando mueve hacia atrás, por favor, preste atención al tráfico, multitud alrededor y debe mover a velocidad baja.
8. Cuando sale de la puerta, el ascensor, por favor conducirlo lentamente, se prohíbe usar escalera mecánica con este producto.
9. Cuando conduce en cuesta abajo o arriba, mantener alta atención, mantener la cinturón de seguridad fijada, y en baja velocidad lineal, y no puede subir a la pendiente que supera el límite de pendiente del producto.
10. No conducir a alta velocidad cruzando pendiente de más de 5 grados.
11. No tratar de pasar obstáculos o escaleras de más de 4 cm, lo puede hacer que el vehículo no pueda moverse hacia adelante, y en esta condición debe soltar inmediatamente la palanca operativa.
12. No pasar zanja de ancho más de 10 CM, cuando pasa zanja de ancho menos 10 CM, debe mantener la dirección vertical.
13. Cuando conduce a través de la encrucijada, debe cumplir con las normas de tráfico, no pasarla cuando en luz roja, cuando cruza la vía del tren, debe parar y observar las condiciones del entorno, luego cruzarlo lentamente en una dirección en ángulo recto con el carril de tren, a fin de evitar caerse en la pista zanja.
14. No deliberadamente encender y apagar el interruptor de alimentación con frecuencia y no iniciar o detener la H3S H3S con frecuencia.
15. No preste la H3S a la persona quien nunca ha utilizado o no está familiarizada con este vehículo; no deje que los niños jueguen con el interruptor de encendido y la palanca de operación.
16. No usar este vehículo con demasiada carga (más de 130 KG).



En funcionamiento, cuando suelta la palanca de operación y la palanca regresa a la posición central, si la H3S todavía no puede detener el movimiento, debe apagar inmediatamente el interruptor de alimentación, póngase en contacto con el distribuidor más cercano.

Atenciones después de la operación:

1. Si no va usar la H3S continuamente por más de 48 horas, debe apagar el interruptor de alimentación.
2. Cuando mueve este producto a otros vehículos, asegúrese de que la batería está fija.

Uso de la batería:

1. Carga la batería suplementaria: si este producto sale de fábrica por corto tiempo, el usuario puede utilizarlo directamente, si ha salido de fábrica por largo tiempo (2 meses o más), la potencia de batería se pierde durante el almacenamiento y el transporte, la batería debe ser complementada cargada antes de usarlo. El método de carga es conectar el enchufe del cargador original del producto al puerto de carga de la batería, y luego conectarlo a la energía AC100-240V por 5 horas hasta que el indicador de cargador muestra que está llena.
2. Carga de batería normal: el funcionamiento de la H3S eléctrica es la descarga de la batería, y después de la operación del producto, debe cargarla inmediatamente.
Por favor apague la energía cuando no la conduce.
3. Los conectores de la caja de batería debe fijarse estrechamente de acuerdo con los requisitos(antes de salir de fábrica, la línea de conexión de caja de batería ha sido conectada de manera confiable). La conexión suelta o incorrecta causará que las partes relacionadas son anormales y provocan daños graves.
4. La batería de litio no puede acercarse a fuente de calor de alta temperatura o fuego, no puede tirar las baterías al agua, se prohíbe colocar batería bajo alta temperatura en el sol.
5. La batería de litio está encerrada correctamente en parte interna, no desmontarla ni descomponerla.
6. Para las baterías de desecho, debe entregarla al organismo de reciclaje o comerciante de automóviles eléctricos, no triarla a fin de evitar la contaminación

Uso de Cargadores :

1. Compruebe cuidadosamente si el voltaje de entrada nominal del cargador (AC100-240V) y el voltaje de la red son consistentes.
2. Cuando el vehículo necesita ser cargado, debe primero conectar el cargador a la batería, luego conectar toma de carga de batería a través de la alimentación de CA, y cuando el indicador de carga es luz roja, lo que indica que la batería se está cargando, cuando la luz se convierte en verde, luego necesita 15 minutos a cargarla por completo. El tiempo de carga es de aproximadamente 2-4 horas (dependiendo de la potencia restante de la batería).

Notas en la carga:

1. Durante la carga, ponerlo a un lugar donde los niños no pueden tocar.
2. No se recomienda usarlo cuando no está completamente cargado.
3. No utilice cargador de otra marca, otros tipos de baterías no deben utilizar este cargador de baterías.
4. El cargador tiene en dentro el circuito de alta tensión, no lo desmonte.
5. Evitar que metal o líquido penetre en el interior del cargador durante uso y almacenamiento y lo protege contra caída e impacto para evitar daños.
6. Durante la carga, no colocar ninguna cosa en superior del cargador.
7. Requiere cargarla completamente y apagar la energía antes del almacenamiento. Cargarla dentro de cada tres meses.

Cómo conducir esta H3S:


1. Después de que el usuario sentarse en el producto, debe fijar bien los cinturones de seguridad.
2. Encienda el interruptor de encendido, luego la pantalla de volumen de carga de 5 niveles estará encendida o parpadeando lentamente.
3. Empujar lentamente la palanca de mando hacia adelante hasta que escuche el sonido del freno electromagnético, en cuyo caso la H3S debe ser capaz de comenzar a moverse hacia adelante. Del mismo modo, empuje o tire la palanca de mando hacia atrás / izquierda / derecha, la H3S se moverá hacia atrás / izquierda / derecha.
4. Ajuste el botón de nivel de velocidad para regular la velocidad de conducción de acuerdo con las condiciones de la carretera, condiciones circundantes y preferencias personales.
5. Cuando quiere detenerse, suelte la palanca operacional y la palanca se volverá a la posición central. Entonces podría escuchar el sonido electromagnético pronto, y esto significa que H3S está frenando de manera estable.
6. Cuando mueve hacia atrás, prestar atención a las condiciones del entorno. Tirar hacia atrás lentamente, la H3S H3S puede mover hacia atrás.

Airwheel reserva el derecho de interpretación final de todos los términos y condiciones de este Manual de Usuario.

Notas de plegar apoyabrazos manualmente :



Estado suelto

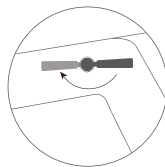

Estado sujetado

- Al plegar hacia arriba apoyabrazos de forma manual (ver el paso ①), por favor tenga cuidado y no se esfuerce demasiado o exceder el límite.
- Al desplegar manualmente hacia abajo apoyabrazos, empuje la varilla de soporte hacia abajo (ver paso ②) para facilitar el despliegue.

Mochila (opcional)



El Velcro de las cuatro esquinas está atado al marco respectivamente (ver Figura derecha), para completar la instalación, y también se puede quitar.



Descargar APP(opcional)




Escanear la imagen para descargar


*Soportar Android 4.3 o superior, iOS 7.0 o superior.


Instrucciones de APP

1. Encender el interruptor de alimentación H3S, y encender APP, así como Bluetooth.
2. Hacer clic en el botón de buscar y hacer los siguientes puntos para conectar (contraseña es 11111111).
3. Puede consultar en la página oficial o hacernos llamadas para obtener más detalles.

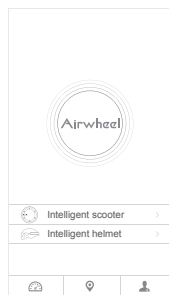


Hacer clic en el scooter inteligente en la interfaz de APP.

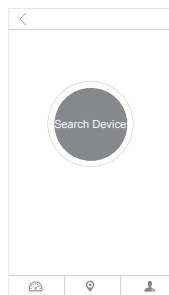


Hacer clic en el botón de buscar o  .




Buscar Airwheel cercana, hacer clic en el modelo encontrado Airwheel para conectar.

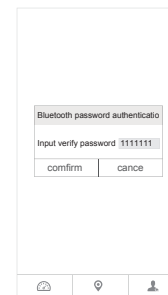


Introducir la contraseña 11111111 para conectar.

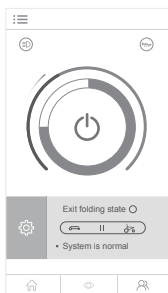


Encienda e ingrese a la página de inicio

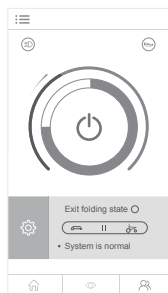


Haga clic en el botón de luz delantera para encender la luz delantera. Haga clic en el botón de bocina, se escuchará un zumbido.

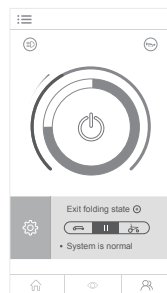


Cuando H3S está apagada, haga clic en el botón de contratación y se contraerá automáticamente. Haga clic en el botón de extensión y se extenderá automáticamente. Haga clic en el botón de detener, dejará de contraerse o extenderse.

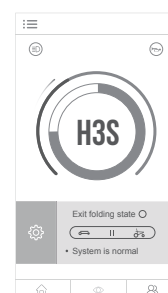


Cuando el icono H3S aparece en la página de inicio, significa que está listo para conducir.

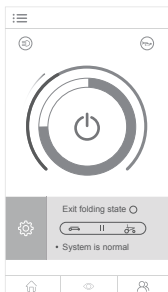


Hacer clic en el botón de interfaz principal para abrir la barra lateral.

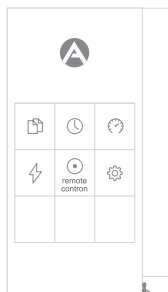

Hacer clic en el botón de control remoto en la barra lateral para abrir la interfaz de control remoto.

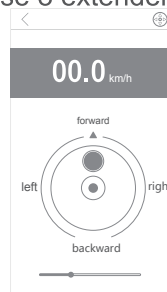

Mover el botón para operar el scooter inteligente para mover hacia adelante, hacia atrás o girar.

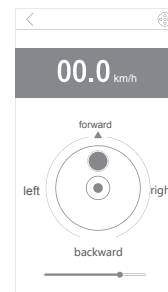

Deslizar para controlar la velocidad. Haga clic en el icono para cambiar el modo de operación.